





Topaz Ultra 17

Vidéo-loupe avec écran de 17"



Aperçu des contrôles

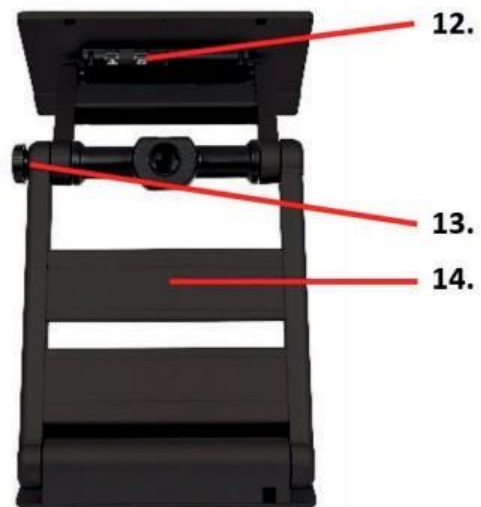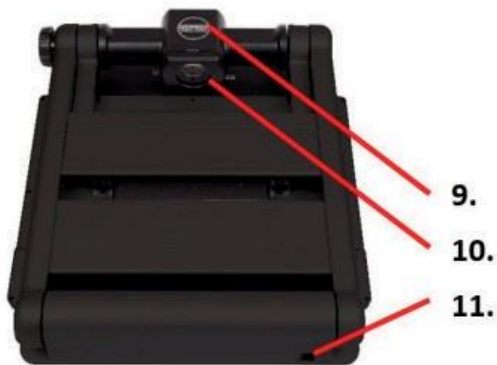

1. Affichage LCD
2. Bouton marche/arret
3. Optimisation de l'image (luminosité et contraste)
4. Bouton capture d'écran
5. Bouton pivotable pour le zoom (plus grand / plus petit)
6. Bouton couleurs contrastées
7. Bouton couleurs naturelles
8. Touche de super fonction
9. Camera
10. Lentille gros plan (ouvrez cette lentille pour voir les éléments à distance)
11. Alimentation électrique (connecter l'adaptateur pour charger la batterie)
12. Sortie HDMI
13. Cadran de position de la caméra
14. Lumières LED

Déplier

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Fermer

1.



2.



3.



4.



5.



Positions de la caméra



1. Lecture bureau
(lecture, visionnage,
bricolage)

2. Mode à distance
(déplier l'objectif)

3. Mode miroir
(vous regarder
vous-même)

Panneau de contrôle



1. Bouton marche/arrêt

- Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

2. Optimisation de l'image (luminosité et contraste)

- En couleurs naturelles : tournez pour régler la luminosité
- Dans les couleurs contrastées : tournez pour régler le contraste.
- Appuyez sur le bouton pour revenir au réglage par défaut.
- Activation/désactivation de l'autofocus : appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

3. Bouton capture d'écran

- Appuyez brièvement pour "geler" l'image à l'écran.

> Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image capturée, régler les couleurs et la luminosité.

- > Si l'image capturée est agrandie, vous pouvez faire glisser l'image avec le bouton de super fonction (7)
- > Appuyez à nouveau sur le bouton de capture d'écran pour revenir à l'image en direct.

- Appuyez et maintenez pendant 3 secondes : état de la batterie

4. Bouton pivotable pour le zoom (plus grand / plus petit)

- Tourner à droite pour agrandir
- Tourner à gauche pour réduire
- Grossissement : 1,4x à 25x, 2,3x à 35x (standard) ou 3,5x à 70x.
 - > Autres paramètres d'agrandissement via le menu : appuyez et maintenez la molette de zoom pour ouvrir le menu.

5. Bouton couleurs contrastées

- Standard 8 couleurs - extensible via le menu (35 combinaisons)

6. Bouton couleurs naturelles

- Appuyez sur le bouton pour afficher les photos et les images dans leur couleur d'origine.
- Maintenir la pression pour dézoomer complètement : fonction de recherche (fonction d'orientation) + relâcher pour zoomer à nouveau

7. Touche de super fonction

- Défilement sur l'image capturée agrandie
 - > Appuyez à nouveau à la fin d'une ligne pour aller au début du paragraphe suivant.
- Ligne de lecture et masque d'image
 - > Appuyez et maintenez pour activer
 - > Gauche ou droite : ligne horizontale, ligne verticale, masque horizontal, masque vertical
 - > Vers le haut ou vers le bas : épaisseur de la ligne de lecture ou distance entre les masques d'image
 - > Rotation : position de la ligne de lecture ou du masque d'image
- Mode HDMI OUT (affichage externe)
- Lorsque le câble de sortie HDMI est connecté, l'écran LCD du Topaz Ultra devient noir et l'image apparaît sur un moniteur externe. Appuyez sur le bouton de super fonction pour changer d'écran

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page below the title.



Des solutions pour un challenge visuel

Des questions de fond ou techniques sur ce produit?
Vous ne trouvez pas la réponse dans ce manuel?
Alors le service après-vente de Sensotec s.a.
est là pour vous aider.

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60

Sensotec Antwerpen
Kempensstraat 100
2030 Antwerpen
T+32 3 828 80 15