

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Wir erklären in alleiniger Verantwortung für alle unsere Systeme, dass diese mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen.

We declare under our sole responsibility that the systems, which have been brought into the market by us, meet the requirements of the following directives.

MANO XXL

(MANOXXL1)

**Richtlinie 93/42/EWG
des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
Risikoklasse I nach Anhang IX Regel 12
CE Konformität nach Anhang VII
und
RoHS II (EG Richtlinie 2011/65/EU)**

***Council directive 93/42/EEC
of 14th June 1993 concerning medical devices
risk class I according to Annex IX standard 12
CE conformity of Annex VII
and
RoHS II (Council directive 2011/65/EEC)***

Die CE– Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung.


The CE mark on the system points out this accordance.

Alsbach-Hähnlein,

20.09.2018

.....
Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

M. Reinecker Geschäftsführer
M. Reinecker General Manager

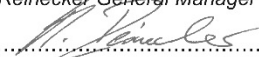
.....
Name und Unterschrift des Befugten
Name and signature of the authorized person

Inhoud

I. Algemeen	6
Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC).....	6
Instructies	7
Product beschrijving	7
Medisch hulpmiddel	7
Voor wie bestemd?	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Verdere ontwikkeling en levensduur van de producten	7
Combinatie met andere medische apparaten	8
Vorzorgsmaatregelen bij het wijzigen van de prestaties van het product.....	8
Hergebruik / installatie en onderhoud.....	8
Reiniging van het apparaat	9
Speciale instructies voor transport en opslag.....	9
Milieuvriendelijke afvoer in overeenstemming met EU-richtlijn 2002/96 / EG	9
Netvoeding	9
Veiligheidsinstructies om schade te voorkomen	10
II. Instructies voor de leesloop MANO XXL	11
Levering	11
Inbedrijfstelling	11
Beschrijving van de bedieningselementen.....	11
Laad de batterij op.....	13
Spanningsindicator	13
Lees-schrijf statief	14
Werking van het apparaat	14
Aan / Uit-knop.....	14

Piepjes.....	15
Pieptoon-controle	15
Camera wissel voorkant of lees camera	15
Toenemen	15
Kleurenmodus	15
Helderheid	17
Verlichting.....	17
Autofocus	17
Bevriesmodus.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Sla afbeelding op.....	18
Opnameweergave	18
Liniaal en masker	18
<input type="checkbox"/> Liniaal	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
<input type="checkbox"/> Kolomliniaal	19
Normaal, geen liniaal en geen maskeromslag	19
Zoeken	19
Navigatie in de live afbeelding	20
Herinneringen.....	20
Frequentie aanpassen (60Hz naar 50Hz)	20
Energiebesparende modus.....	21
Herstel fabrieksinstellingen	21
Hardware reset.....	21
Foutdiagnose	22
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld	22
Zwart scherm / wit scherm	22
De afbeelding verandert niet.....	22
Er zijn vlekken of vlekken op het scherm	22
Technische details	23
Materiaaldefect en garantiebepalingen	24

I. Algemeen

Belangrijke informatie voor de bediening van MANO XXL!
Lees deze instructies voordat u het apparaat gebruikt!

Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Dit leessysteem geschikt voor gebruik in alle omgevingen, zoals een woonkamer, die rechtstreeks op een openbaar voedingsnet geschikt voor residentiële doeleinden zijn aangesloten.

Dit optische hulpmiddel is bedoeld voor gebruik in de gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of exploitant moet ervoor zorgen dat het wordt gebruikt in de beschreven omgeving.

Het maakt uitsluitend gebruik van HF-energie voor zijn eigen functie.

Het genereert zeer weinig hoogfrequente storingen en interferentie met andere apparaten in de nabijheid is onwaarschijnlijk. Niettemin moet er rekening mee worden gehouden dat de gecombineerde werking van het apparaat met andere apparaten interferentie met het apparaat of andere apparaten kan veroorzaken. Daarom moet erop worden gelet dat het apparaat niet naast of op een ander apparaat wordt geplaatst.

Als de plaatsing van dit toestel in de nabijheid van medische instrumenten niet kan worden vermeden, dan moet de verantwoordelijke van dit instrumentarium geïnformeerd worden dat de prestatie van de toestellen in het oog moet worden gehouden.

Elektronische apparaten zijn gevoelig voor elektrische ontlading en hoogfrequente elektromagnetische velden.

Attentie!

Om interferentie met de apparatuur door RF-interferentie (bijv. Microgolven) te vermijden, moet de gebruiker een afstand van minimaal één meter tot draagbare en mobiele RFtelecommunicatieapparatuur in acht houden. Het toestel mag niet in de patiëntomgeving worden gebruikt.

Instructies

De gebruiksaanwijzing is een belangrijk document en moet als zodanig op een veilige plaats worden bewaard.

Product beschrijving

MANO XXL is een optisch-elektronisch visueel hulpmiddel voor het vergroten van tekst- en afbeeldingsjablonen voor permanent privé-gebruik.

- Het 10-inch breedbeeld LCD-scherm (ongeveer 25,4 cm diagonaal) biedt een zeer scherp en contrastrijk beeld.
- Ong. 2 tot 32x, traploze vergroting dankzij de modernste camera-technologie
- Ergonomisch ontwerp met uitvouwbare voet, compact en gemakkelijk te gebruiken.
- Het lage gewicht van 680g zorgt voor een comfortabele gebruik thuis of onderweg.

Medisch hulpmiddel

MANO XXL is een klasse I medisch hulpmiddel en voldoet aan richtlijn 93/42 EEC. Wanneer u het apparaat buiten de EU-lidstaten gebruikt, moeten de respectieve landspecifieke richtlijnen in acht worden genomen.

Voor wie bestemd?

Dit leessysteem is een medisch hulpmiddel voor het vergroten van tekst- en beeldsjablonen. Zeer slechtziende personen compenseren er hun visuele beperking mee. Uitsluitend voor gebruik in privé-omgevingen.

Verdere ontwikkeling en levensduur van de producten

De richtlijn medische hulpmiddelen vereist dat de fabrikant van een medisch hulpmiddel een periode specificeert die de zogenaamde veilige operatie beschrijft. We voldoen aan een wettelijke vereiste en geven om formele redenen, een periode van drie jaar vanaf de datum van aankoop, op.

Tip:

Deze genoemde periode van 3j staat los van het feitelijk mogelijk gebruik of de maximale gebruikstijd van het leessysteem door de gebruiker. Integendeel. Drie jaar is de periode waarbinnen de verdere ontwikkeling van systemen volgens onze huidige ervaring zo ver is gevorderd dat oudere systemen als technisch verouderd kunnen worden beschouwd en mogelijk een nieuwe aanbesteding kan worden geadviseerd.

Combinatie met andere medische apparaten

Als de gebruiker de MANO XXL in combinatie met andere medische apparaten wenst te gebruiken, is het raadzaam contact op te nemen met Reinecker Vision GmbH of een van zijn verkooppartners.

Vorzorgsmaatregelen bij het haperen van het product

Als de MANO XXL hapert, schakel dan het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet in deze toestand. Breng uw verdeler, Sensotec, op de hoogte van het probleem.

Hergebruik / installatie en onderhoud

De apparaten mogen alleen technisch worden gereviseerd en voorbereid door Reinecker Vision GmbH of een geautoriseerd bedrijf. Hergebruik mag alleen worden uitgevoerd na veiligheidsinspectie, reiniging en desinfectie.

Reiniging van het apparaat

- Koppel het apparaat los van de voeding voordat u het gaat reinigen.
- Gebruik de meegeleverde microvezeldoek of een pluisvrije, licht vochtige doek om te reinigen.
- Zorg dat er tijdens het reinigen geen vloeistoffen in het apparaat kunnen binnendringen.

Speciale instructies voor transport en opslag

Om veiligheidsredenen mag dit apparaat alleen in de originele verpakking worden vervoerd. Opslag mag alleen plaatsvinden in gesloten en droge ruimtes in de originele verpakking.

De volgende opslag- en transportvoorwaarden moeten in acht worden genomen:

- Luchtdruk: 700 tot 1000 hPa
- Temperatuurbereik: + 5° C tot + 40° C
- Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 80%

Milieuvriendelijke recyclage in overeenstemming met EU-richtlijn 2002/96 / EG

Het apparaat bevat elektronische componenten. Om milieurisico's of gevaren als gevolg van onjuiste verwijdering te voorkomen, moet de verwijdering van het product, inclusief de accessoires, voldoen aan de toepasselijke richtlijnen.

Netvoeding

Alleen de originele voedingseenheid van Reinecker Vision GmbH mag voor de netvoeding worden gebruikt..

Waarschuwing:

Het gebruik van andere toestellen kan leiden tot verhoogde afgifte van elektromagnetisme en tot schade aan het product.

Veiligheidsinstructies om schade te voorkomen

De volgende opmerkingen dienen voor uw persoonlijke en operationele veiligheid:

1. Steek de netspanningsadapter of het netsnoer niet in een defect stopcontact, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
2. Steek de netspanningsadapter of het netsnoer niet in een stopcontact met natte handen.
3. Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden. Andere opladers kunnen het apparaat beschadigen.
4. Als het apparaat is bedoeld voor batterijgebruik, mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt.
5. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, dat beeldinterferentie zou kunnen veroorzaken.
6. Gebruik het apparaat alleen in het temperatuurbereik van + 10 ° C tot + 35 ° C (50 ° en 95 ° F).
7. Zorg dat er geen vloeistoffen in het apparaat kunnen komen. Gebruik het apparaat alleen in een droge omgeving.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de omgeving van medische apparaten (ziekenhuisomgeving).
9. Druk niet op het scherm en plaats geen zware voorwerpen op het apparaat, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
10. Probeer het apparaat niet zelf te repareren of te demonteren. Dat zou de garantie annuleren. Neem zo nodig contact op met de leverancier van het apparaat.
11. Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik de meegeleverde reinigingsdoek of een pluisvrije, licht bevochtigde doek om te reinigen. Gebruik geen alcoholische of agressieve schoonmaakmiddelen.

II. Instructies voor de leesloop MANO XXL

Levering


De volgende inhoud is opgenomen in de verpakking:

- Full HD-leesloop MANO XXL
- Voeding met aansluitkabel
- HDMI-kabel (1,5 m)
- Bescherming case
- Reinigingsdoek
- Gebruiksaanwijzing


Inbedrijfstelling

Voor u de MANO XXL voor de eerste maal gebruikt, moet u de batterij volledig opladen. Meer informatie daarover vindt u in het hoofdstuk „De batterij opladen“


Beschrijving van de bedieningselementen

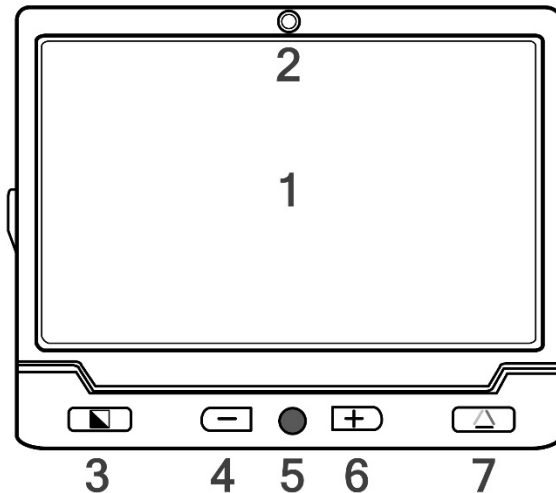


- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. LCD-display | 5. Joystick |
| 2. camera aan de voorkant | 6. Zoom+/inzoomen |
| 3. Kleurselectieknop | 7. Knop ware kleuren |
| 4. Zoom - / uitzoomen | |

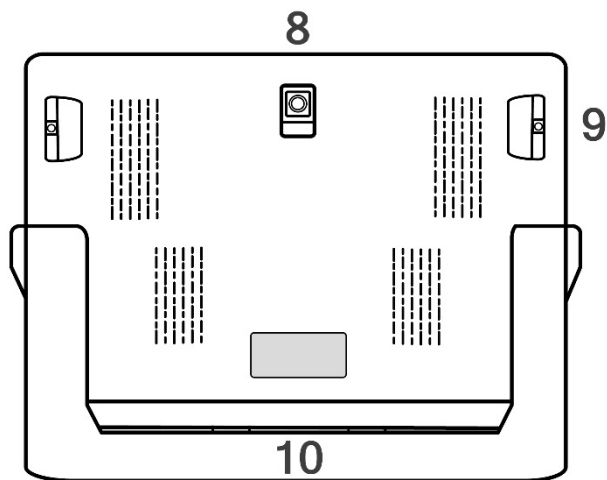

8. Lezen camera 9. LED-lichtenheid 10. Lezen schrijfstandaard

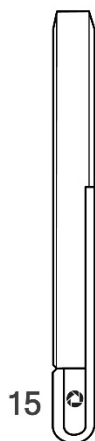


- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 11. aan-/uit-knop | 15. Bevries-knop |
| 12. oplaadingang | 16. Camerawissel |
| 13. HDMI-aansluiting | 17. USB-aansluiting |
| 14. liniaal/masker
+ zoekfunctie | 18. Autofocus-knop |

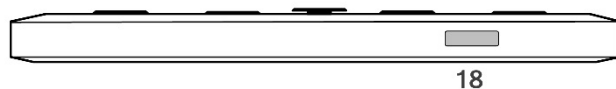

Laad de batterij op

- Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de voedingsadapter.
- Steek de stekker van het netsnoer in de oplaadingang van het apparaat.
- Het laden begint zodra u de voedingsadapter in een stopcontact steekt.

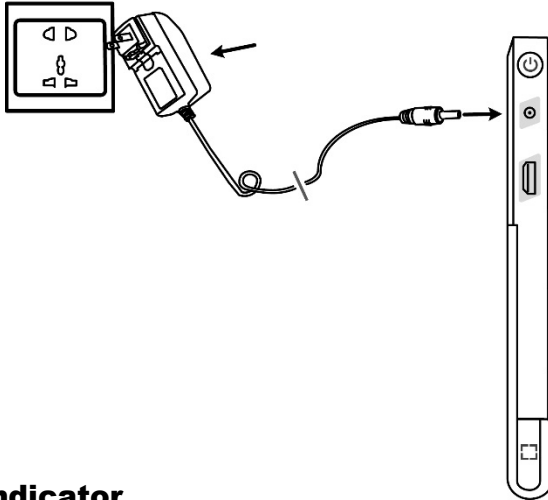


Spanningsindicator

- Wanneer het apparaat tijdens het opladen volledig is uitgeschakeld, licht de stroomindicator groen op en gaat automatisch uit wanneer deze volledig is opgeladen. Volledig opladen duurt ongeveer 5 uur en biedt een gebruikstijd van maximaal ongeveer 3 uur (afhankelijk van de bedieningsmodus).
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de stroomindicator op het apparaat groen op tijdens het opladen.
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld maar niet op netspanning is aangesloten en de batterij is hoog, licht de stroomindicator groen op. Als de batterij bijna leeg is, licht de indicator rood op. Wanneer de display rood begint te knipperen, moet de batterij onmiddellijk worden opgeladen.
- U kunt het batterijniveau controleren door op de aan / uit-knop te drukken. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Aan / Uit-knop".



Lees-schrijf statief

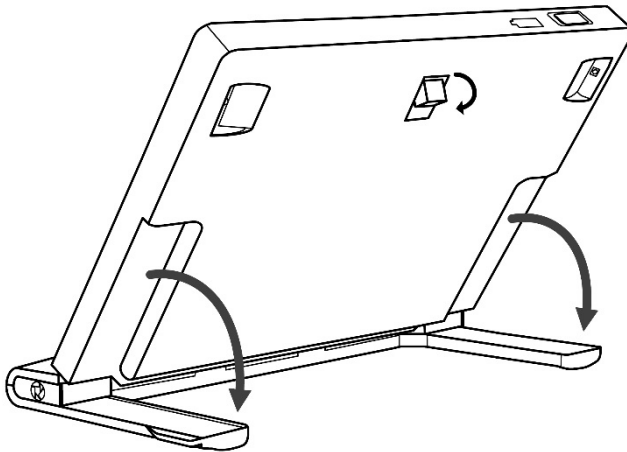- Met de geïntegreerde opvouwbare schrijfstandaard, instelbaar in een ergonomische kijkhoek, kan de MANO XXL gebruiker langer lezen in een comfortabele positie. Bovendien is er voldoende ruimte onder de camera om met een pen te schrijven. Open het statief zoals getoond in de volgende illustratie.
- De achterste camera is zo ontworpen dat deze automatisch uitlijnt met de positie van het statief, zodat zowel het zicht dichtbij als veraf door het apparaat wordt ondersteund. Vouw het statief dicht bij gebruik van de afstandweergave.



Werking van het apparaat



Aan / Uit-knop

- Houd de aan / uit-knop  ongeveer 5 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten.
- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de aan / uit-knop  om de huidige status van de batterij, de bevroesmodus, de scherpstelstatus en de pieptoon te controleren.
- Als u op andere knoppen drukt in combinatie met de aan / uit-knop, worden combi-functies geactiveerd. Verdere informatie is te vinden in de volgende hoofdstukken.



Biepjes

- Aan / Uit bieptoon
- Knop bieptoon
- Rand bieptoon
- Bieptoon lage batterijspanning





Bieptoon-control

- Houd de aan / uit-knop  ingedrukt terwijl u op de knop voor de ware kleur  drukt om het geluidssignaal in of uit te schakelen.

Camera wissel voorkant of lees camera

- Schuif de camera-schakelaar  ← naar links om de camera aan de achterzijde te openen voor lezen en op afstand kijken.
- Schuif de camera-schakelaar  → naar rechts om de camera aan de voorzijde te openen.

Toenemen

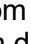

- Druk op de knop Inzoomen  om de vergroting stap voor stap te verhogen. Houd deze knop  ingedrukt om de vergroting continu te verhogen.
- Druk op de knop Uitzoomen  om de vergroting te verkleinen. Houd deze knop  ingedrukt om de vergroting continu te vermindern.






Vergrotingsbereik bij een positie op de tafel: 2x - 32x

Kleurenmodus

Een kleurenmodus is een vooraf gedefinieerde kleurencombinatie. De full-colour-modus is handig voor het weergeven van afbeeldingen of kaarten.

De kleurselectieknop combineert verschillende voor- en achtergrondkleuren om het lezen te vergemakkelijken.

- Druk op de kleurselectieknop  om door de lijst met geavanceerde kleurencombinaties te bladeren.
- Druk op de ware kleurtoets  om terug te keren naar de full colour-modus





- Druk in de geavanceerde kleurmodus 3 seconden op de knop voor de kleurmodus . Een rood hartpictogram  verschijnt en twee pieptonen geven aan dat de huidige kleurkeuze is toegevoegd aan de lijst met voorkeurs kleurencombinaties.
- Druk kort op de kleurselectieknop  om te schakelen tussen Wit op zwart, Zwart op wit, Voorkeurkleur op voorkeursachtergrond, Voorkeurachtergrond op gewenste voorgrondkleur.
- Als u de kleurselectieknop  gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, geeft het pictogram  op het volledige scherm een piepton om aan te geven dat u bent overgeschakeld naar de ingebouwde geavanceerde kleurselectielijst.

Geïntegreerde kleurkeuzelijst (18 Varianten)



 Wit op zwart	 Zwart op Wit
 Geel op zwart	 Zwart op geel
 Wit op blauw	 Blauw op wit
 Geel op blauw	 Blauw op geel
 Groen op zwart	 Zwart op groen
 Violet op zwart	 Zwart op violet
 Blauw op zwart	 Zwart op blauw
 Wit op groen	 Groen op wit
 Wit op rood	 Rood op zwart

Helderheid


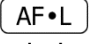
De helderheid van het scherm kan worden aangepast in de kleurenmodus en in de geavanceerde contrastmodus.

- Houd de aan / uit-knop  ingedrukt terwijl u op de zoomknop  drukt om de helderheid te verhogen. De in de fabriek ingestelde waarde is groen gemarkeerd.
- Houd de aan / uit-knop  ingedrukt en druk op de zoomknop  om de helderheid te verlagen.




Verlichting

- Houd de aan / uit-knop  ingedrukt terwijl u op de knop voor stilstaand beeld  drukt om de LED-verlichting handmatig in of uit te schakelen.

Autofocus

- Druk op de focusknop  om de autofocus uit te schakelen (autofocus UIT), er verschijnt een rood kader op de rand van het scherm. Dit is vooral handig als u onder de camera op de tafel schrijft.
- Druk nogmaals op de focusknop  autofocus opnieuw in te schakelen (autofocus AAN), het rode kader verdwijnt uit het scherm.

Bevriesmodus








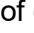

- Het "bevriezen" van een afbeelding op het LCD-scherm kan nuttig zijn om te lezen. In de modus voor stilstaande beelden is zowel de vergroting als de kleurverandering van de display mogelijk.
- Druk op de knop voor stilstaande  beelden om de huidige afbeelding te "bevriezen".
- Druk nogmaals op de knop voor stilstaand  beeld om het beeld of de monitor te "ontgrendelen".
- Om de foto te vergroten, kunt u de joystick  gebruiken om vrij door de afbeelding te navigeren.

Sla afbeelding op


- Houd de knop voor stilstaande  beelden 3 seconden ingedrukt om de huidige afbeelding op te slaan. De MANO XXL heeft een geheugen van 2 GB, zodat u minstens 1000 afbeeldingen foto's kunt opslaan.

Opmerking: Wanneer het maximale aantal foto's dat kan worden opgeslagen is bereikt (na 1000 afbeeldingen verschijnt het pictogram "Geheugen bezet"), moet u eerst enkele afbeeldingen wissen in de afspeelmodus voordat u een nieuw beeld kan opslaan.


Opnameweergave

- Om de fotoweergavemodus in te schakelen, houdt u de ware kleurknop  gedurende 3 seconden ingedrukt.
- Gebruik de joystick  om de gewenste afbeelding in de miniatuurgalerij te selecteren. Druk op de ware kleurtoets  om de afbeelding weer te geven. U kunt de afbeelding bekijken en navigeren met dezelfde functies als beschreven in het hoofdstuk "Foto's". Druk op de knop Afbeelding stilbeeld  om terug te keren naar de miniatuurgalerij.
- Druk in de miniatuurgalerij op de knop Zoeken  om de doelfoto te selecteren die moet worden verwijderd. Druk nogmaals op de zoektoets  om te bevestigen of druk op een willekeurige andere toets om te annuleren.
- Als u alle afbeeldingen wilt verwijderen, houdt u de knop Zoeken  in de miniatuurgalerij gedurende 5 seconden ingedrukt. Druk nogmaals op de knop Zoeken  om te bevestigen of druk op een andere knop om de bewerking te annuleren.
- Houd de ware kleurtoets  ongeveer 3 seconden ingedrukt om de afspeelmodus te verlaten.

Liniaal en masker

Druk op de knop Zoeken  om te schakelen tussen de liniaal en de maskerklep.

• Liniaal

Beweeg de joystick  omhoog / omlaag om de positie van de lini-

aal te wijzigen. Beweeg de joystick naar rechts / links om de breedte van de liniaal te vergroten / verkleinen.

- **Kolom liniaal**

Beweeg de joystick naar links / rechts om de positie van de liniaal te wijzigen. Beweeg de joystick omhoog / omlaag om de breedte van de kolomliniaal te vergroten / verkleinen.

- **Horizontale maskerdekking / lijndekking**

Beweeg de joystick omhoog / omlaag om de positie van de lijndekking te wijzigen. Beweeg de joystick naar rechts / links om de afstand tussen de maskerkap te vergroten verhogen / verlagen.

- **Verticale maskerafdekking / kolomafdekking**

Beweeg de Joystick links/rechts, om de positie van de kolomafdekking te veranderen. Beweeg de Joystick naar boven/beneden, om de afstand tussen de maskerafdekking te verhogen of verminderen.

Normaal, geen liniaal en geen maskeromslag

- Druk op de aan / uit-toets om de liniaal of maskermodus snel te verlaten.

Tip: Houd er rekening mee dat het verplaatsen van de joystick in deze modus niet beschikbaar is.





Zoeken




- Houd de zoekknop gedurende 1 seconde ingedrukt totdat een "zoekbox" verschijnt.
- Verplaats de inhoud in de "zoekbox" totdat u bij het gebied komt dat u wilt bekijken. Laat vervolgens de knop Zoeken los en de afbeelding verschijnt weer in de oorspronkelijke vergroting en het vernieuwde uiterlijk.


Volgende functie is zeker handig voor u:

U kijkt bijvoorbeeld naar het gedeelte van een kaart met een bepaalde vergroting. Dan wil je een ander deel zien zonder je geselecteerde vergroting te veranderen.

Navigatie in de live afbeelding

- In het geval van een vergroot beeld, kunt u de joystick  gebruiken. Navigeer in de live afbeelding om meer in de afbeelding te zien zonder het apparaat te verplaatsen.
- Druk tegelijkertijd op de zoom in $+$ en uit-knoppen $-$ om de afbeelding terug te brengen naar het midden (een rode stip verschijnt).
- Er zijn twee manieren om snel naar het begin- / eindpunt te springen,
 - 1) Houd de aan / uit-knop  ingedrukt en verplaats de joystick .
 - 2) Beweeg de joystick  snel twee keer in dezelfde richting.



Als u bijvoorbeeld klaar bent met het lezen van een regel en wilt beginnen met een nieuwe regel, houd dan de aan / uit-knop  ingedrukt en beweeg de joystick  naar links of verplaats de joystick  tweemaal snel tweemaal naar links. Het begin- of eindpunt wordt automatisch opgeslagen en bijgewerkt bij het lezen volgens het maximale navigatiebereik.

- De navigatiesnelheid kan in drie niveaus worden ingesteld: langzaam, gemiddeld (fabrieksinstelling) en snel. Beweeg de joystick  naar één kant en druk op de vergrotingsknop om de leessnelheid te verhogen / verlagen.

Herinneringen


Het apparaat slaat automatisch de laatste instellingen op die zijn gemaakt, zoals Wijzigingen in de kleurmodus, vergroting, pieptoon bij normaal uitschakelen en weer inschakelen bij de volgende keer dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Frequentie aanpassen (60Hz naar 50Hz)

Houd de aan / uit-knop  en de kleurselectieknop  ongeveer 3 seconden ingedrukt om de frequentie te wijzigen van 60 Hz naar 50 Hz of omgekeerd. Wijzig alleen indien nodig als u een ongemakkelijke flikkering op het display ziet.



HDMI-uitgang

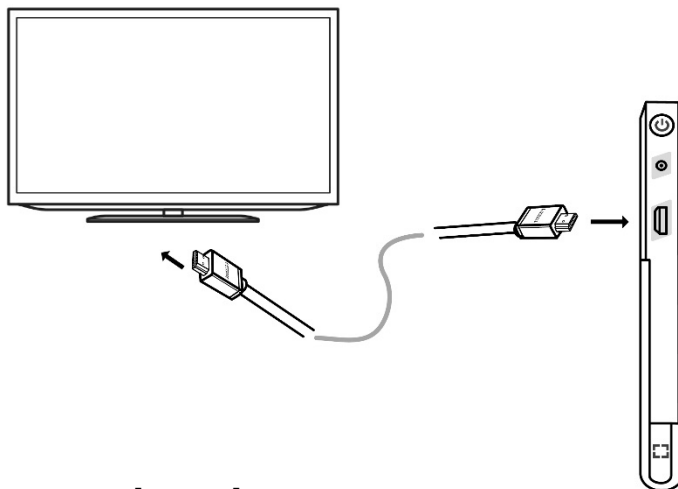Verbind het apparaat met uw externe weergaveapparaat met een HDMI-kabel voor een beter en groter scherm (zie afbeelding).





Energiebesparende modus





Als u het apparaat langer dan 3 minuten niet hebt gebruikt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

- Houd de aan / uit-knop  ingedrukt en druk op de kleurselectieknop  om de automatische energiebesparingsfunctie handmatig in of uit te schakelen (fabrieksinstelling: AAN).
(Let op het maansymbool.)

Herstel fabrieksinstellingen

Houd de bevroers knop  tegelijkertijd met de zoekknop  5 seconden ingedrukt om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na het resetten.

Hardware reset

Als het apparaat niet meer reageert of niet op de normale manier wordt uitgeschakeld met de aan-uitknop , drukt u tegelijkertijd op de aan-uitknop , de toets  en de ware kleurtoetsen  om de hardware-reset uit te voeren.

Foutdiagnose

Het apparaat kan niet worden ingeschakeld

- Sluit de voedingsadapter aan.
- Laad de batterij op.
- Voer een hardwarereset uit.

Zwart scherm / wit scherm

- Als het apparaat op een vlak, uniform oppervlak wordt geplaatst, kan de monitor een zwart of wit beeld weergeven. Til het apparaat op zodat het niet langer op het oppervlak ligt.
- Pas de vergroting aan.
- Pas de kleurmodus aan.
- Start het apparaat opnieuw.
- Voer een hardwarereset uit.

De afbeelding verandert niet

- Als het apparaat zich in de stilstaand of afspeelmodus bevindt, verandert het beeld niet.
- Druk op de AAN / UIT-knop om de huidige status te controleren.
- Start het apparaat opnieuw.
- Voer een hardwarereset uit.

Er zijn vlekken of vlekken op het scherm

- Pas de helderheid aan.
- Reinig de display en de camera.

Neem contact op met uw lokale dealer als het probleem niet is opgelost.

Technische details

- **Display:** 10-inch LCD-scherm, HD-scherm
- **Camera:** autofocus, Full HD
- **Grootte:** < = 245x200x22 mm
- **Gewicht:** < = 680 g
- **Kleurmodus:** ware kleur, met meer kleuren door de gebruiker gedefinieerde modus; 18 geïntegreerde geavanceerde kleurmodi
- **Vergroting:** 2x – 32x
- **Batterij:** ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij
- **Oplaadtijd:** ongeveer 5-6 uur
- **Gebruikstijd:** maximaal 4-5 uur (afhankelijk van de ingestelde modus)
- **Voedingsadapter:** Ingang: 110-240V; Uitgang: 5V/3A

Materiaaldefect en garantiebepalingen

1. De aansprakelijkheid voor materiaaldefecten is 24 maanden (aansprakelijkheid is alleen geldig binnen de EU) en begint met de overdracht. Het tijdstip van aflevering is door middel van handtekening op de afleveringsbon of door de gegevens die zijn ingevoerd in de gebruiksinstructies bevestigd.
2. De onderdelen die tijdens een reparatie of verhandeling worden vervangen, worden het eigendom van Reinecker Vision GmbH.
3. De aansprakelijkheid voor garantie en materiaalfouten omvat geen schade veroorzaakt door onjuiste behandeling of door het negeren van de gebruiksaanwijzing.
4. Bij interventies door personen die niet zijn geautoriseerd door Reinecker Vision GmbH vervalt de garantieclaim en de garantieclaim indien de schade oorzakelijk verband houdt met de interventie.
5. De garantie omvat ook lampen die dienen om het leesmateriaal en andere slijtgedelen zoals batterijen te verlichten.
6. In geval van reparatie of reparatie moet het apparaat in de originele doos naar de fabrikant in Alsbach-Hähnlein worden gestuurd. Porto, verpakking en verzekering zijn niet gedekt.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Uw lokale dealer:

Sensotec nv
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke

Tel support: 050 40 47 47
E-mail: support@sensotec.be

Notes:

Reinecker Vision GmbH Zentrale

Vertrieb, Kundenberatung:

Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Kundendienst:

Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 06257 9311-0

Fax: 06257 9311-8008

E-Mail: info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Reinecker Vision GmbH International Contact

sales department, customer relations:

Sandwiesenstraße 19
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

customer service:

Erlenweg 3
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: +49 6257 9311-0

Fax: +49 6257 9311-8230

E-Mail: international@reineckervision.de
www.reineckervision.com

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder einem Servicefall direkt an unser Hauptwerk in Alsbach-Hähnlein oder an eine unserer Niederlassungen.

Bei im Ausland erworbenen Produkten kontaktieren Sie im Servicefall bitte Ihren dort ansässigen Händler.

In case service is necessary, please contact your authorized distributor.