

Sensotec



ORCAM Read Stand "Audio"

Avec enceintes bluetooth et sur batterie

OrCam Read Audiostand - Manuel.

Copyright © 2024 - Sensotec NV

Tous droits réservés.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Version : 1.0.

Coordonnées du producteur :

Sensotec SA - Vlamingveld 8 - BE-8490 Jabbeke.

info@sensotec.be - www.sensotec.be.

Siège social :

Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke

T +32 50 39 49 49 - F +32 50 39 49 46

sales@sensotec.be

Présentation de l'Audio Stand OrCam Read

Merci d'avoir choisi l'OrCam Read comme solution pour vocaliser le texte. Grâce au trépied spécial développé par Sensotec, les utilisateurs aveugles peuvent aussi utiliser cet appareil comme appareil de lecture. Le trépied est en partie fabriqué en aluminium, mesure 45 cm de haut lorsqu'il est déplié et ne pèse que 475 g. Léger et compact, il peut donc facilement être transporté dans votre sac. L'outil idéal pour travailler, lire, etc. à la maison, en déplacement, pour plus d'indépendance dans la vie de tous les jours.

Contenu de la boîte

Le kit que vous avez reçu contient les éléments suivants :

- Le bras du trépied avec support de lecture OrCam à un haut-parleur Bluetooth
- Un trépied
- Une vis
- Un adaptateur électrique

Vérifiez toujours au préalable que tous les composants soient présents dans la boîte !

Entretien et maintenance

Nettoyez votre OrCam Read Audio Stand à l'aide d'un chiffon humide et bien essoré (n'utilisez JAMAIS un essuie mouillé). N'utilisez jamais de produits corrosifs : cela endommagerait irrémédiablement le boîtier.

Conservez l'emballage dans lequel l'OrCam Read Audio Stand a été livré. L'appareil ne peut être expédié que dans cet emballage.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation d'un type incorrect peut endommager l'appareil.

Ne jamais mettre l'appareil en marche s'il a été exposé à l'eau. Rassemblez tous les câbles de manière à éviter tout risque de trébuchement ou de pincement.

Garantie

Sensotec NV offre une garantie sur l'OrCam Read Audio Stand pour un maximum de deux ans après achat, conformément aux dispositions légales en matière de garantie.

Les dommages causés par une utilisation inappropriée ou négligente ne sont pas couverts par la garantie.

Les travaux d'entretien et de réparation ne peuvent être effectués que par les techniciens de Sensotec nv. L'appareil ne doit jamais être ouvert par l'utilisateur ou des tiers. Dans ce cas, la garantie expire sans aucune obligation de notre part.

Support technique

Enfin, vous pouvez contacter votre fournisseur local pour obtenir une assistance technique. Si le problème technique persiste, ou si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans ce manuel, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail (support@sensotec.be) ou par téléphone au +32 50 40 47 47.

Les composants de l'OrCam Read Audiostand

Vue d'ensemble

- Le bras du trépied avec support de lecture OrCam à un haut-parleur Bluetooth (a)
- Un trépied (b)
- Une vis (c)
- Un adaptateur électrique 5V (d)



Comment assembler les différents composants


- 1) Prenez le trépied (b) et assemblez-le avec le bras du trépied (a). Vous remarquerez qu'il y a un point en relief (x) au milieu du trépied et sous le bras du trépied au milieu (x). Ce point maintient les deux éléments ensemble.



- 2) Prenez la vis (c) et visser les deux éléments ensemble.



- 3) Branchez l'adaptateur électrique 5V (d).

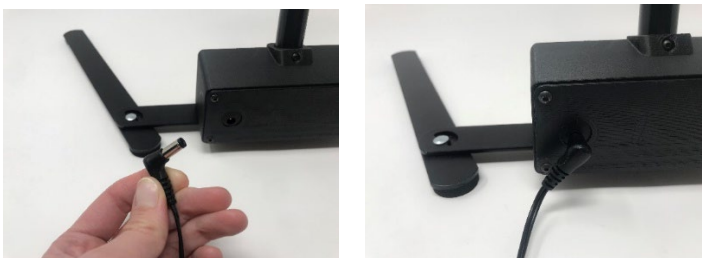

4) Allumez l'interrupteur.



Comment connecter l'appareil via Bluetooth :

1. Allumez le haut-parleur. Vous entendrez le son de démarrage
2. Allumez l'OrCam Read et ouvrez le menu des paramètres audio de cette façon : maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé, appuyez sur l'un des boutons de volume, puis relâchez le bouton marche/arrêt.
3. Allez dans le menu des paramètres de connectivités, puis dans le menu des paramètres Bluetooth.
4. Sélectionnez « Pour vous connecter à un périphérique audio Bluetooth, appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres paramètres, appuyez sur les boutons de volume. »
5. Sélectionnez MH-M38 comme haut-parleur et confirmez.
6. Vous êtes maintenant prêt à utiliser l'enceinte.

Bon à savoir sur l'OrCam Read Audio Stand

Si vous activez le haut-parleur et recevez une notification par intermittence, cela indique que la batterie est faible.

Le chargement avec le chargeur fourni prend jusqu'à 3 heures.

Une autre méthode pour améliorer l'autonomie de l'Orcam Read consiste à utiliser le port USB situé à l'arrière du haut-parleur pour alimenter l'Orcam Read. De cette façon, l'Orcam Read sera rechargé pendant son utilisation.

Le voyant bleu situé à l'avant de l'enceinte indique l'état de charge de l'enceinte.





Des solutions pour un challenge visuel

Des questions de fond ou techniques sur ce produit?
Vous ne trouvez pas la réponse dans ce manuel?
Alors le service après-vente de Sensotec s.a.
est là pour vous aider.

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60

Sensotec Antwerpen
Kempenstraat 100
B-2030 Antwerpen
T+32 3 828 80 15

