

Sensotec



ORCAM Read Stand “Audio”

Met speakers en batterij

OrCam Read Audiostand - Handleiding.

Copyright © 2024 - Sensotec NV

Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

Versie: 1.0.

Contactgegevens producent :

Sensotec NV - Vlamingveld 8 - BE-8490 Jabbeke.

info@sensotec.be - www.sensotec.be.

Hoofdkantoor :

Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke

T +32 50 39 49 49 - F +32 50 39 49 46

sales@sensotec.be

Maak kennis met de OrCam Leesstandaard

Bedankt dat u de OrCam Read koos als oplossing om tekst hardop te laten lezen. Dankzij het speciale statief dat Sensotec ontwikkelde, kan dit apparaat ook ingezet worden als voorleesapparaat. Het statief is gedeeltelijk gemaakt van aluminium, meet uitgeklast 45 cm en weegt slechts 475 g. Het is licht en compact, dus je kunt het gemakkelijk meenemen in je tas. Het ideale hulpmiddel om thuis en onderweg te werken, te lezen en te zorgen voor meer onafhankelijkheid in je dagelijks leven.

Inhoud van de verpakking

De kit die je hebt ontvangen bevat de volgende items:

- Een statiefarm met houder voor OrCam Read met Bluetooth-luidspreker
- Een statiefvoet
- Een schroef
- Elektrische adapter

Controleer altijd vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn!

Verzorging en onderhoud

Maak uw OrCam Read Audiostand schoon met een vochtige, goed uitgewrongen doek (gebruik NOOIT een natte deken). Gebruik nooit bijtende producten: dit veroorzaakt onherstelbare schade aan de behuizing.

Bewaar de verpakking waarin de OrCam Read Audiostand is geleverd. Het apparaat kan alleen in deze verpakking worden verzonden.

Gebruik alleen de meegeleverde netadapter. Gebruik van een onjuist type kan het apparaat beschadigen.

Schakel het apparaat nooit in als het is blootgesteld aan water. Leid alle kabels zo dat er niet over gestruikeld of gekneld kan worden.

Garantie

Sensotec NV biedt een garantie op de OrCam Read Audiostand tot maximaal twee jaar na aankoop, in overeenstemming met de wettelijke garantiebepalingen.

Schade veroorzaakt door onjuist of nalatig gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

Onderhouds- en herstellingswerken mogen enkel uitgevoerd worden door technici van Sensotec nv. Het apparaat mag nooit door de gebruiker of derden geopend worden. Indien dit toch gebeurt, vervalt uw garantie zonder enige verplichting van onzentege.

Technische ondersteuning.

Tot slot kunt u contact opnemen met uw plaatselijke leverancier voor technische hulp. Als het technische probleem aanhoudt, of als u het antwoord op uw vraag niet in deze handleiding kunt vinden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail (support@sensotec.be) of telefonisch op +32 50 40 47 47.

De componenten van de OrCam Read Audiostand

Overzicht

- Een statiefarm met houder voor OrCam Read met Bluetooth-luidspreker (a)
- Een statiefvoet (b)
- Een schroef (c)
- 5V voedingsadapter (d)



De verschillende onderdelen in elkaar zetten


- 1) Neem de statiefvoet (b) en monteer het met de statiefarm (a). U zult zien dat er een verhoogde stip (x) in het midden van het statief zit en onder de statiefarm in het midden (x). Dit houdt de twee elementen bij elkaar.



- 2) Neem de schroef (c) en schroef de twee elementen aan elkaar.



- 3) Sluit de 5V voedingsadapter aan op (d).

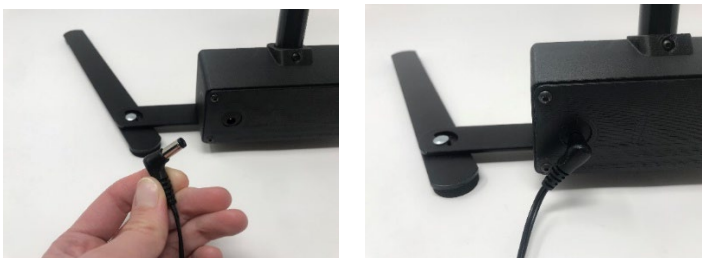

- 4) Zet de schakelaar aan.



Het apparaat verbinden via Bluetooth :

1. Zet de luidspreker aan. U hoort het opstartgeluid
2. Zet de OrCam Read aan en open het menu audio-instellingen via;
Houd de aan/uitknop ingedrukt, druk op een van de volumeknoppen en laat de aan/uitknop daarna los.
3. Ga naar het instellingenmenu voor verbinding maken en vervolgens naar het menu Bluetooth-instellingen.
4. Selecteer "Om verbinding te maken met een bluetooth audioapparaat, druk op de bedieningsknop, voor andere instellingen, druk op de volumeknoppen".
5. Kies MH-M38 als luidspreker en bevestig.
6. U bent nu klaar om de luidspreker te gebruiken.

Goed om te weten over de OrCam Read Audiostand

Als je de luidspreker activeert en met tussenpozen een melding ontvangt, is dit een indicatie dat de batterij bijna leeg is.

Opladen met de meegeleverde oplader duurt tot 3 uur.

Een alternatieve methode om de levensduur van de batterij van de OrCam Read te verlengen, is door de USB-poort aan de achterkant van de luidspreker te gebruiken om de OrCam Read van stroom te voorzien. Op deze manier wordt de OrCam Read opgeladen terwijl u deze gebruikt.

De blauwe led aan de voorkant van de luidspreker geeft de oplaadstatus van de luidspreker aan.





Oplossingen voor een visuele uitdaging

Inhoudelijke of technische vragen over dit product?
Vind je het antwoord niet in deze handleiding?
Dan staan onze Service & Support collega's voor je klaar.

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Antwerpen
Kempstraat 100
B-2030 Antwerpen
T+32 3 828 80 15

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60