



VoxiVision

Appareil de lecture &
vidéo-loupe de poche

 voxweb
L'INTERNET ACCESSIBLE A TOUS




Chaque fois que vous verrez ce symbole dans le manuel, cela indiquera qu'il existe une commande vocale associée à une action

1/ PREMIERS PAS

Contenu du coffret


- VoxiVision (avec coque de protection)
- Support pliable + housse de rangement
- Accessoires
 - Tour de poignet détachable
 - Chargeur secteur + câble USB Type-C
 - Etiquettes QR code x50
 - Bouton VoxiVision

VoxiVision

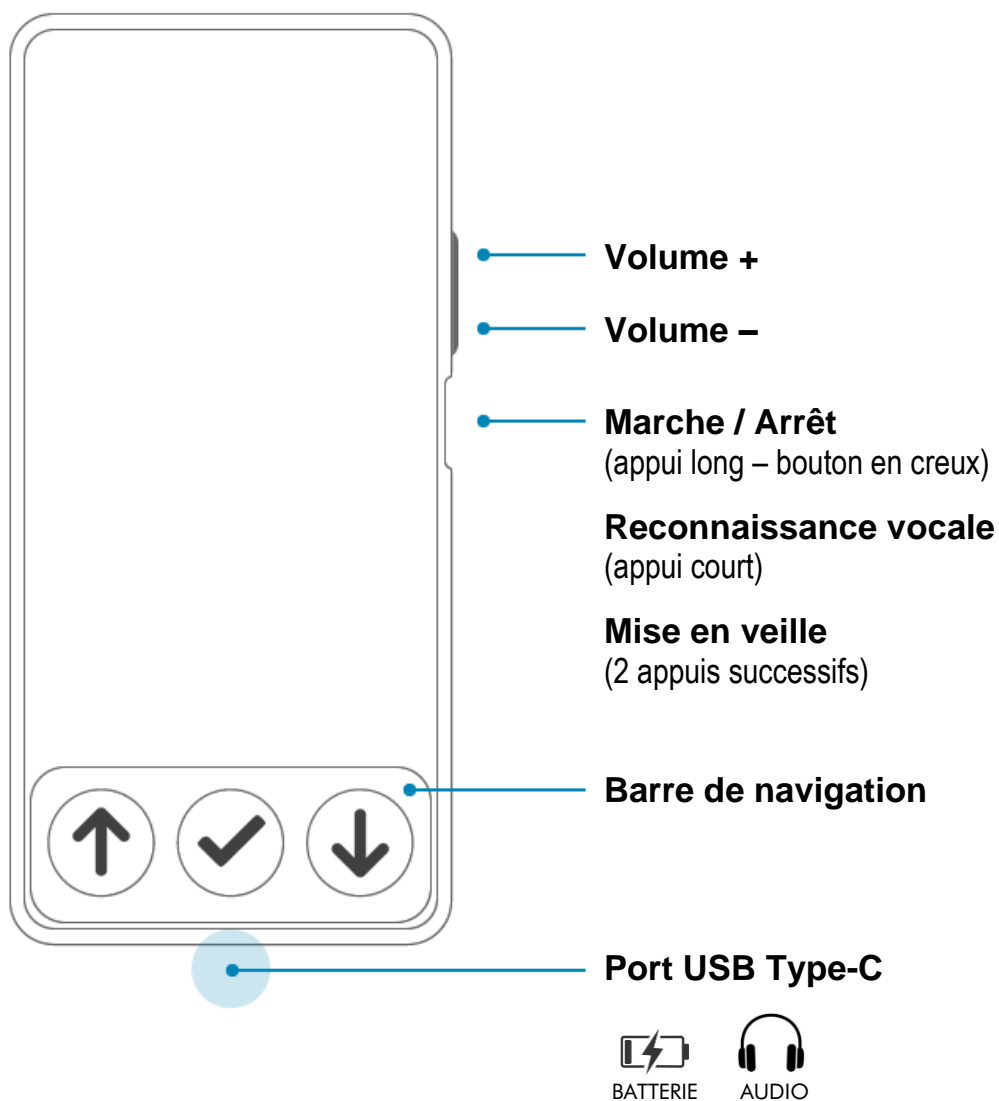

Support pliable

Le support pliable se compose de 3 éléments : le support en bois sur lequel sera posé le VoxiVision, le pied vertical (équipé d'une butée rotative) et le plateau métallique (avec un QR Code) sur lequel sera posé le document.

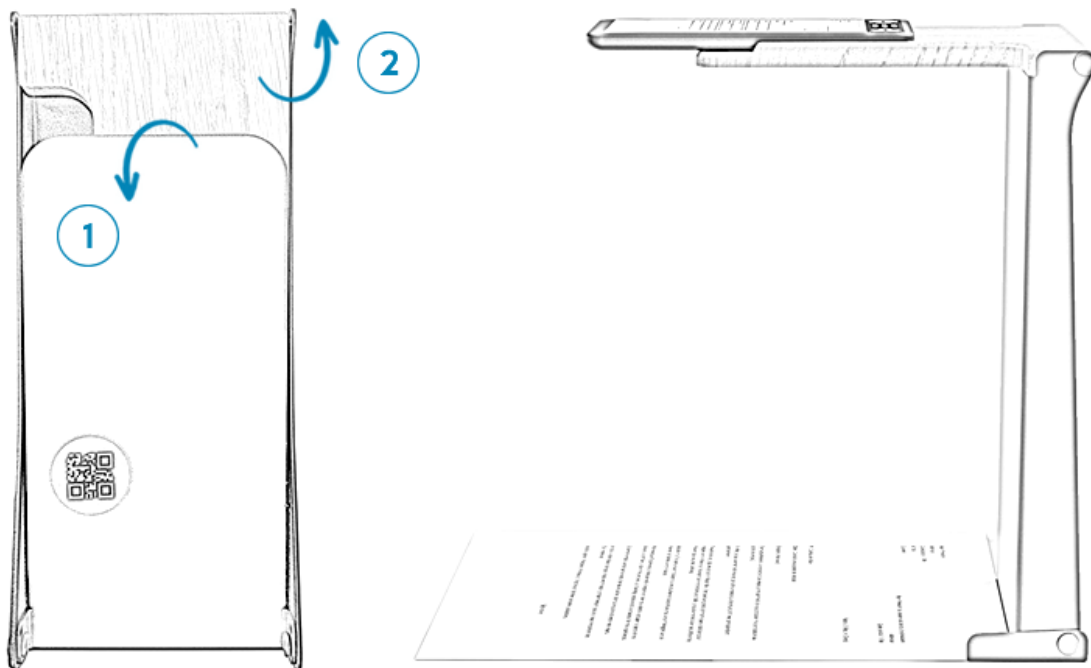

Etapes pour déplier le support :

1 - Saisissez le plateau métallique

- Ecartez-le du support en bois : une résistance s'exerce à ce moment-là
- Faites-le pivoter d'un $\frac{3}{4}$ de tour, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus (vous sentirez alors un clic)

2 - Saisissez le support en bois


- Faites-le pivoter d'un $\frac{3}{4}$ de tour, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus

Positionnez le plateau en métal et le support en bois, face à vous.

Pour caler parfaitement un document, vous pouvez abaisser la butée qui se trouve en bas du pied vertical sur le côté droit.

Bouton VoxiVision

Le bouton VoxiVision vous permet de déclencher la reconnaissance vocale, que le VoxiVision soit sur le support ou non.

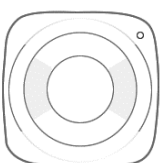

Pour connecter le bouton, faites un appui court sur le bouton Marche / Arrêt, situé sur la tranche droite de l'appareil, et dites « bouton ». Suivez ensuite les indications.

Marche / Arrêt

Pour allumer votre VoxiVision, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt (situé sur la tranche de droite sous les touches de volume), jusqu'à sentir une vibration. Le démarrage complet de l'appareil prend moins d'une minute. Si le VoxiVision ne s'allume pas, pensez à le charger.

A chaque démarrage, le VoxiVision se lance directement en mode Machine à Lire (et non pas sur l'écran d'accueil).

Pour éteindre votre VoxiVision, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt. Vous aurez alors un écran de confirmation vous demandant si vous souhaitez éteindre.



DITES

« **éteindre** » : éteindre le VoxiVision

Mise en veille / Sortie de veille

Pour mettre en veille, faites 2 appuis successifs sur le bouton Marche / Arrêt.

Par défaut, VoxiVision se met en veille au bout de 2 minutes d'inactivité (délai modifiable dans les Paramètres avancés).



DITES

« **veille** » : mettre en veille

Pour sortir du mode veille, appuyez 1 fois sur le bouton Marche / Arrêt.

Navigation

Pour effectuer un retour à l'écran précédent, appuyez avec 2 doigts sur l'écran.



En bas de l'écran de votre VoxiVision, se situe la barre de navigation sur laquelle sont présents 3 boutons (en creux repérables à l'aide du guide-doigts). A l'aide de ces 3 boutons, vous pourrez effectuer toutes les manipulations de votre VoxiVision.



En fonction de l'écran, l'apparence et les fonctions des 3 boutons peuvent changer.

Commandes vocales

Vous avez également la possibilité de contrôler votre appareil à la voix grâce aux commandes vocales (voir chapitre 10).

Pour lancer une commande vocale, faites un appui court sur le bouton Marche / Arrêt (situé sur la tranche droite de votre VoxiVision). Une fois que vous entendrez un bip sonore (une animation avec un micro clignotant se lance), vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s'arrête dès que vous arrêtez de parler.

Chargement

Pour charger votre VoxiVision, branchez le chargeur secteur au port USB Type-C de votre VoxiVision (situé sur la tranche du bas, au milieu).

Lorsque la batterie passe sous les 20%, vous aurez une notification au niveau de l'écran d'accueil.

Pour connaître à tout moment le niveau de batterie, utilisez la reconnaissance vocale.



DITES

« **batterie** » : connaître l'état de la batterie

2/ MACHINE A LIRE

Lecture automatique (avec le support)

Cette fonction permet d'écouter un document très simplement : posez votre document et la lecture démarre automatiquement.

Allez dans la rubrique Machine à Lire. Posez votre VoxiVision sur le plateau en bois, dès que vous entendez « Lecture automatique activée », vous pouvez alors positionner votre document sur le plateau métallique.

La lecture automatique démarrera instantanément. Afin de vous permettre de positionner correctement vos documents, la lecture automatique ne démarre que si aucune main n'est détectée au-dessus du document.

VoxiVision est capable de détecter et lire des documents dans leur langue d'origine (voir langues supportées en fin de manuel).

Pour arrêter la lecture, retirez le document du plateau du support. Le VoxiVision est alors prêt pour la prochaine lecture automatique.

Contrôles pendant la lecture

Pendant la lecture du document, vous pouvez utiliser vos mains pour déclencher certaines actions.

**Met en pause /
Reprend la lecture**



Main droite à plat
au-dessus du document

**Relit la phrase
précédente**



Main gauche à plat
au-dessus du document

**Sauvegarde le
document**



Poing droit fermé à plat
au-dessus du document

A noter que tant que vous laissez votre main gauche au-dessus du document, vous remontez de phrase en phrase.

Ou via les commandes vocales :

DITES



« **pause** » / « **lecture** » : mettre en pause ou reprendre la lecture


« **précédent** » : écouter la phrase précédente

« **sauvegarder** » : sauvegarder le document

Lecture manuelle (sans le support)

Le VoxiVision peut être également utilisé sans le support tenu dans votre main.

Pour lancer la reconnaissance de texte, appuyez sur le bouton du milieu dans la barre de navigation.

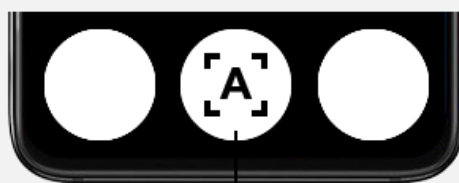


Lancer la reconnaissance de texte

Bouton milieu

La lecture démarrera automatiquement.

Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyez avec un doigt n'importe où sur l'écran.

Lors de la lecture d'un texte, la barre de navigation change.

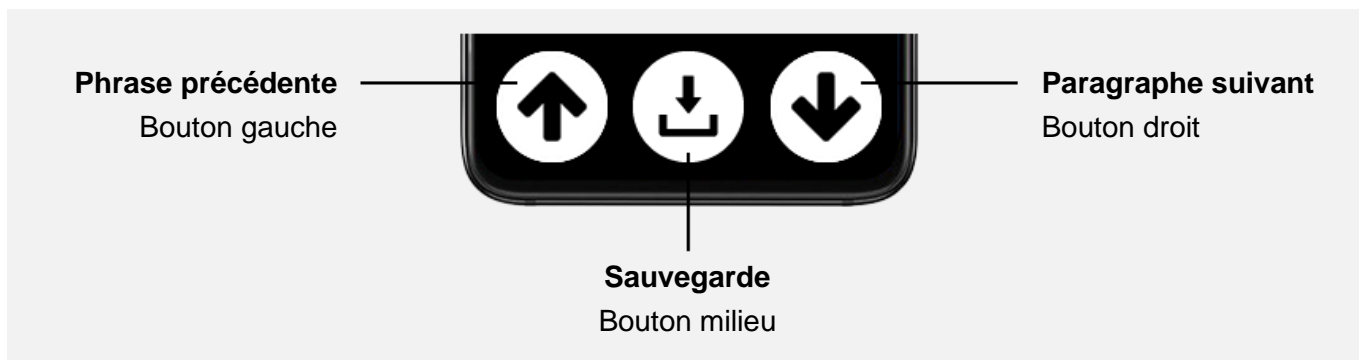


Options avancées (traducteur et extraction intelligente)

La Machine à Lire propose des fonctions avancées qui ne sont pas activées par défaut. Pour les activer, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Machine à lire Fonctions avancées et choisissez Activer.

Ne fonctionne pas quand le VoxiVision est sur le support mais uniquement disponible lors de la lecture manuelle.

Le bouton du milieu propose dans cette configuration d'accéder aux options.

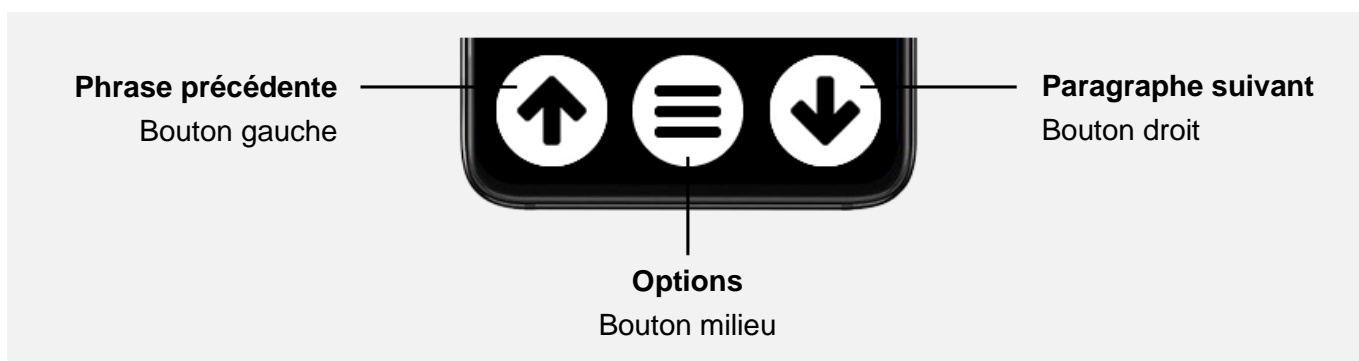

Les options vous permettent de :

- Sauvegarder : Enregistrement dans la Galerie (dossier Reconnaissance de texte)
- Traduire : Traduction possible vers 10 langues
- Extraction intelligente : Détection automatique des numéros de téléphone, adresses postales, adresses email présents dans le résultat de la reconnaissance de texte. Ne s'affiche que si des résultats sont détectés.

Lecture par mot / caractère

Pour activer cette fonction, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Machine à lire Lecture par mot / caractère.

Sur l'écran de résultats de la reconnaissance de texte, faites un appui long avec un doigt sur l'écran pour activer la lecture par mot / caractère. A partir de ce moment-là, vous pouvez vous déplacer de mot en mot à l'aide des flèches dans la barre de navigation.

Lorsque vous vous arrêtez sur un mot, celui-ci est automatiquement épelé.

Mot précédent
Bouton gauche



Mot suivant
Bouton droit

Pour désactiver la lecture mot par mot, faites de nouveau un appui long avec un doigt sur l'écran.

Fonctionne également dans la Galerie.

3/ MULTI-PAGES

Le mode Multi-pages permet d'extraire le texte de plusieurs documents à la suite et de les sauvegarder dans un seul document.

Par défaut, cette rubrique est masquée sur l'écran d'accueil. Pour la rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Écran d'accueil : personnalisation.

Allez dans la rubrique Multi-pages. Posez votre VoxiVision sur le plateau en bois, dès que vous entendez « Mode multi-pages activé », vous pouvez alors positionner votre document sur le plateau métallique.

Le document est automatiquement détecté et l'analyse de cette première page va se lancer. Afin de vous permettre de positionner correctement vos documents, le traitement ne démarre que si aucune main n'est détectée au-dessus du document. Une fois l'opération terminée, un message vous indique de positionner un nouveau document ou de sauvegarder.

Retirez complètement le document présent sur le plateau puis positionnez votre nouveau document. L'analyse va de nouveau être lancée automatiquement et prendre quelques secondes. Vous pouvez ainsi répéter l'opération jusqu'à la limite de 50 pages.

Néanmoins si vous devez laisser vos mains pour maintenir le document à plat, vous pouvez forcer le traitement du document grâce à la commande vocale « lire ».

Pour sauvegarder, vous avez 2 possibilités :

- Via un geste : Positionnez votre poing droit ou gauche fermé au-dessus de votre document
- Via la commande vocale : Dites « sauvegarder »

Si aucune activité n'est détectée au bout de 2 minutes, le document en cours est automatiquement sauvegardé.

Le document sera sauvegardé dans la Galerie, dossier Reconnaissance de texte avec comme nom le préfixe « multipages » suivi d'un chiffre.

4/ LECTEUR DE CODE-BARRES

Le lecteur de code-barres vous permet de scanner des produits de la vie quotidienne (aliments, médicaments, produits hygiène et beauté...) et de les identifier très facilement.

Positionnez votre VoxiVision à au moins 15 cm au-dessus de votre produit. Présentez les différentes faces de votre produit jusqu'à entendre un bip sonore indiquant qu'un code-barres a été détecté.

Utilisation avec le support (mode scannette)


Pour plus de confort, le VoxiVision peut être également utilisé avec le support. Posez le VoxiVision sur le support en bois, le QR code sur le plateau du bas doit être visible. Au bout de quelques secondes, vous entendrez « Mode scannette activé ».

Passez alors vos produits sous le VoxiVision. Dès qu'un code-barres est identifié, les informations seront lues et affichées (l'écran se tourne alors vers vous).

Personnalisation code-barres / Ajout nouveau code-barres

Cette fonction vous permet d'ajouter des informations vocalement à un code-barre existant ou d'ajouter vos propres code-barres en cas de code-barres inconnu.

Une fois le résultat d'un code-barres annoncé, appuyez sur le bouton du milieu Options et choisissez Personnalisation.

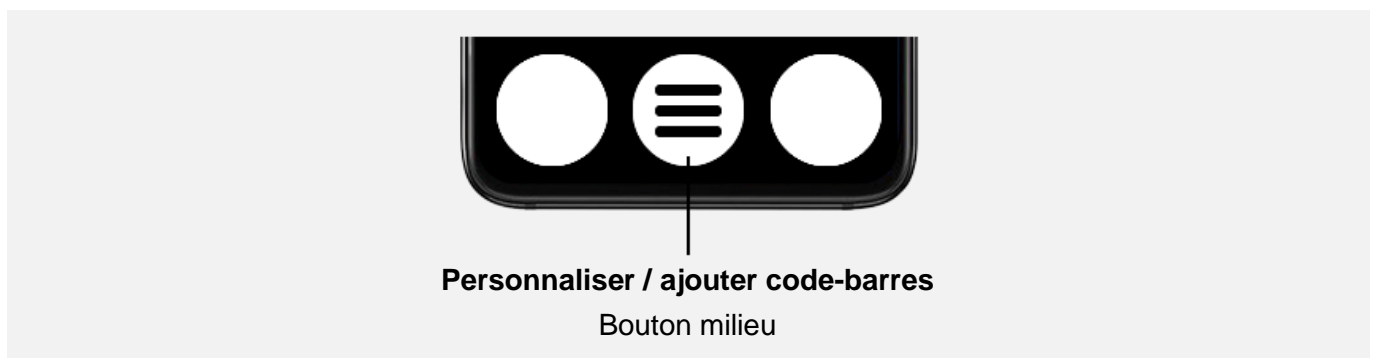

L'enregistrement vocal démarre automatiquement.

Durée maximum de chaque enregistrement : 1 minute.

Lors du prochain scan du code-barres, vous entendrez alors votre enregistrement vocal précédé du nom du produit (en cas de code-barre existant).

En appuyant sur le bouton du milieu (Icône corbeille), vous pouvez effacer votre enregistrement.

Dans le cas d'une personnalisation de code-barres, cela n'effacera que votre enregistrement et pas le produit de la base de données.


Mise à jour base de données code-barres

Pour vérifier si une mise à jour de la base de données code-barres est disponible, allez dans Paramètres > Système > Mise à jour code-barres.

Vous devez être connecté à Internet (voir chapitre 9 – Paramètres puis Connexions).

5/ LOUPE

La loupe peut être utilisée en mode portrait ou paysage.

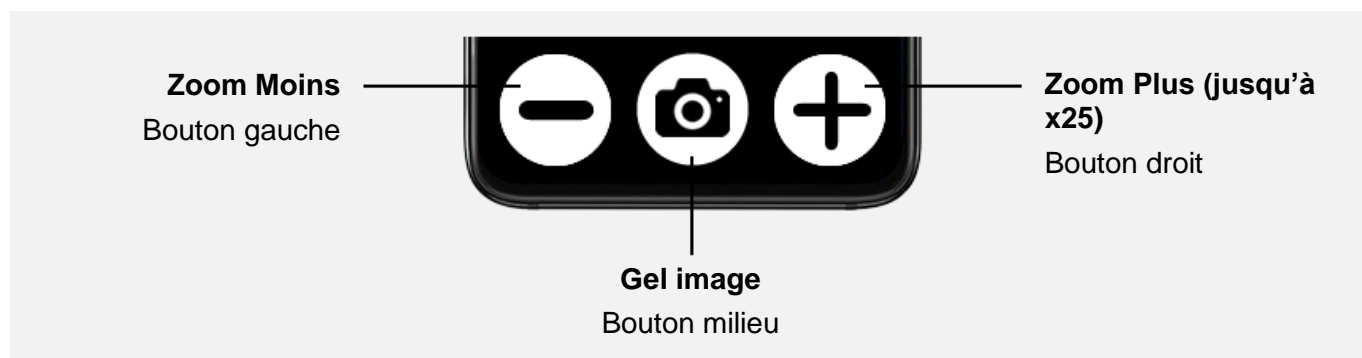

Vous pouvez zoomer à l'aide des boutons de droite ou de gauche.

Gel image

Pour geler l'image, appuyez sur le bouton du milieu représenté par un appareil photo.


Une fois l'image gelée, vous pouvez l'agrandir / la réduire (boutons droite et gauche) et vous déplacer au sein de cette image (avec un doigt posé sur l'écran). Ou bien directement en pinchant l'écran avec 2 doigts.

Vous pouvez également lancer l'extraction de texte via la commande vocale.



DITES

« lire » : extraire le texte de l'image (disponible uniquement si image gelée)

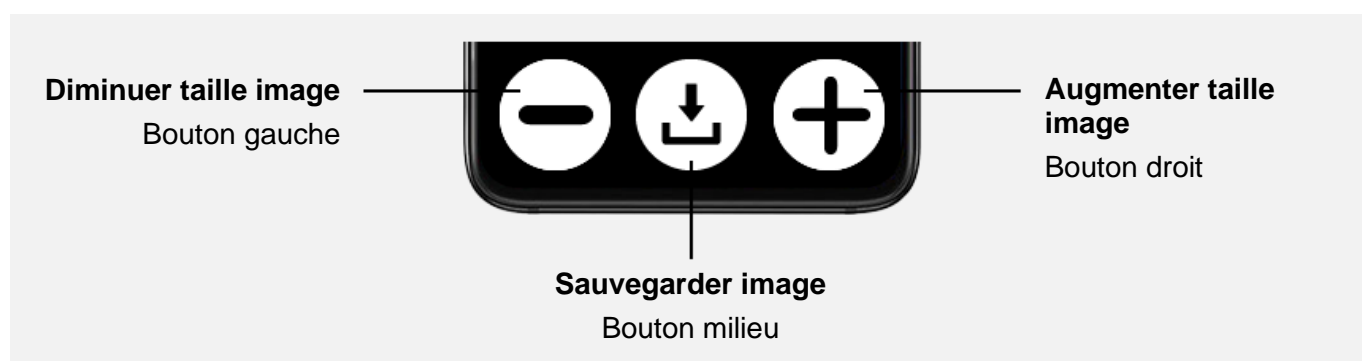

Pour sauvegarder l'image, appuyez sur le bouton du milieu. L'image sera sauvegardée dans la Galerie, dossier Images.

Pour quitter le mode gel, effectuez le geste Retour (appui avec 2 doigts sur l'écran).

Filtres

En appuyant sur les boutons de volume situés sur la tranche droite du VoxiVision, vous pouvez modifier le filtre (avant ou après avoir gelé l'image).

En plus de la couleur naturelle, vous avez le choix entre 6 filtres différents.

Par défaut, le dernier filtre utilisé est sauvegardé. A ce moment-là, les filtres seront dans l'ordre suivant : votre filtre sauvegardé, couleur naturelle puis la liste des autres filtres.

Vous pouvez personnaliser la liste des filtres proposés dans les paramètres avancés (Paramètres > Paramètres avancés > Loupe Personnalisation filtres).


6/ GALERIE

La galerie vous permet de consulter les fichiers textes sauvegardés depuis la Machine à Lire ou Multi-pages et les images sauvegardées depuis la Loupe.

Fichier Texte (dossier Reconnaissance de texte)

Les fichiers sont classés du plus récent au plus ancien. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez visualiser dans la liste.

Une fois le texte à l'écran, la barre de navigation change.

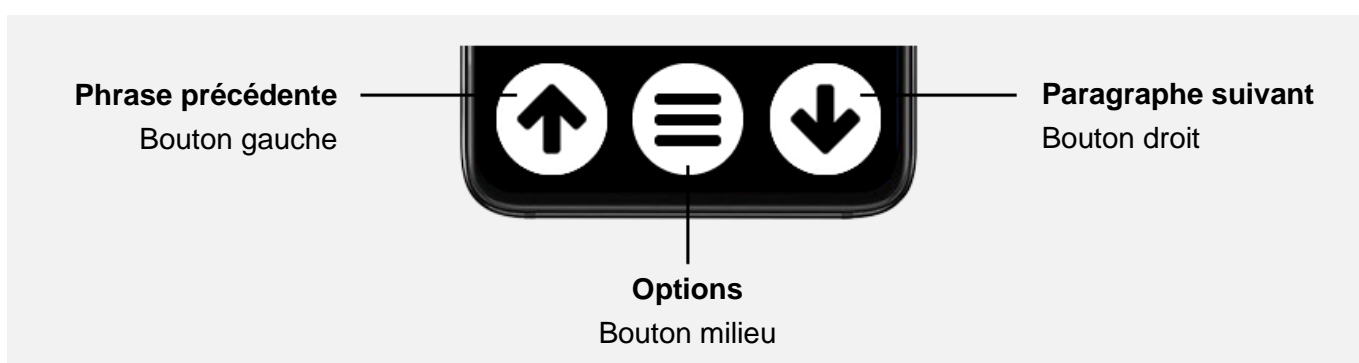

Les options vous permettent de :

- Renommer (avec saisie vocale)
- Supprimer
- Traduire (si Machine à lire Fonctions avancées activées)
- Extraction intelligente (si Machine à lire Fonctions avancées activées) : Détection automatique des numéros de téléphone, adresses postales, adresses email présents dans le résultat de la reconnaissance de texte. Ne s'affiche que si des résultats sont détectés.

Texte Multi-pages

Les textes sauvegardés à partir du mode Multi-pages (nom de fichier commençant par *multipages*) proposent des fonctions avancées, non disponibles pour les fichiers texte simple :

- Reprise de lecture : Permet de commencer la lecture et de reprendre, lors de la prochaine consultation, à l'endroit où vous vous êtes arrêté.
- Navigation page par page : Un appui long sur les flèches haut ou bas permet d'atteindre la page précédente ou suivante.


Traductions

Si vous avez sauvegardé au moins une traduction, le dossier Traduction (présent à la racine de Galerie) sera visible dans la galerie.

Fichier Image (dossier Images)

Les images sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Sélectionnez l'image que vous souhaitez visualiser dans la liste.

Une fois l'image à l'écran, la barre de navigation change.

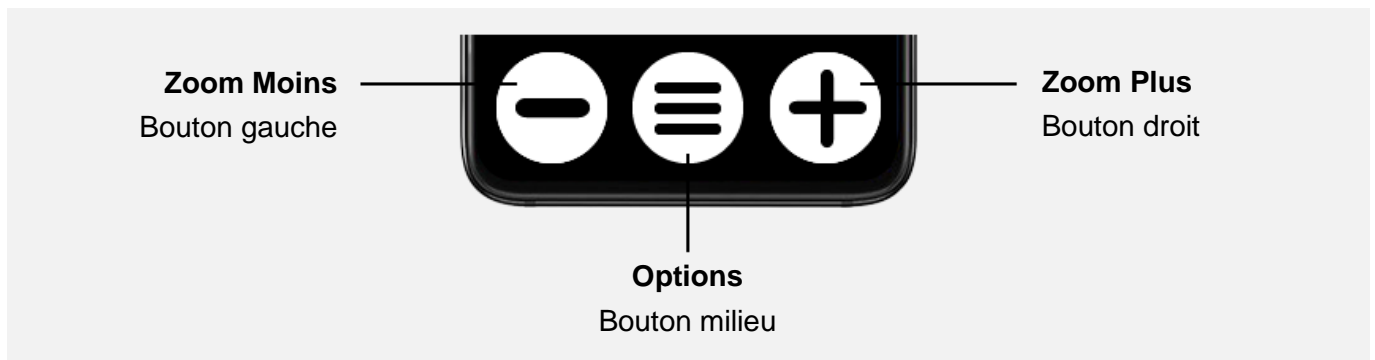

Les options vous permettent de :

- Extraire le texte (possibilité de sauvegarder et traduire ce texte)
- Renommer (avec saisie vocale)
- Supprimer

7/ AUTRES FONCTIONS

7.1 - Lecteur / enregistreur d'étiquettes

Le lecteur - enregistreur d'étiquettes vous permet d'étiqueter vocalement un produit à l'aide des étiquettes fournies (x50). Ces étiquettes résistent au froid et à l'eau et sont réutilisables à l'infini.

Par défaut, cette rubrique est masquée sur l'écran d'accueil. Pour la rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Écran d'accueil : personnalisation.

Enregistrement étiquette

Prenez une des étiquettes de la planche d'étiquettes, puis passez votre VoxiVision au-dessus de l'étiquette (attention à positionner votre appareil à au moins 15 cm de l'étiquette).


Dès que l'étiquette sera détectée, vous sentirez une vibration. Lancez puis arrêtez votre enregistrement vocal en appuyant sur le bouton Micro du milieu.

Durée maximum de chaque enregistrement : 1 minute.

Lecture étiquette

Si vous passez votre VoxiVision au-dessus d'une étiquette déjà enregistrée, vous sentirez une vibration et l'enregistrement associé sera automatiquement lu.

Pour réécouter l'étiquette, faites un appui avec un doigt sur l'écran.

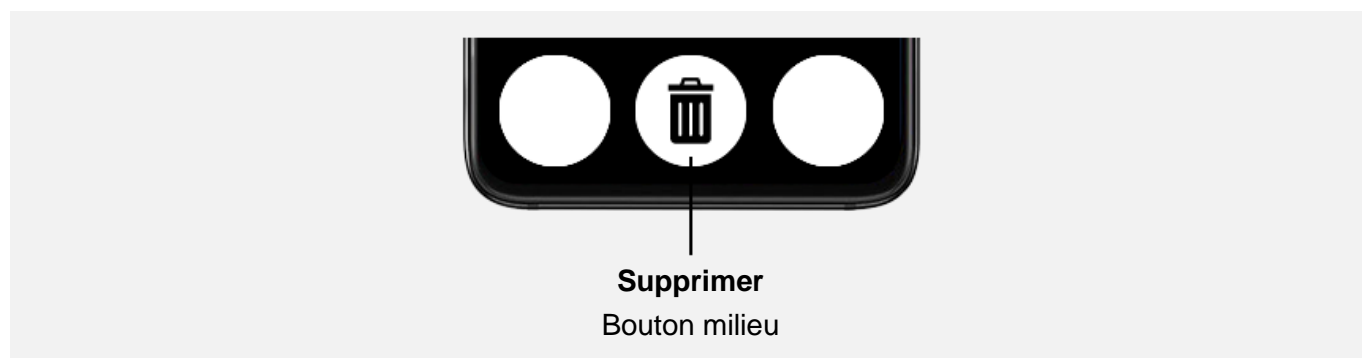

Les options vous permettent de :

- Supprimer

7.2 - Détecteur de billets

Par défaut, cette rubrique est masquée sur l'écran d'accueil. Pour la rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Écran d'accueil : personnalisation.

Positionnez un billet de banque devant le VoxiVision, sa valeur sera instantanément affichée en gros sur l'écran et annoncée vocalement.

Le détecteur propose en plus de l'Euro, 6 devises : Livre Sterling, Dollar US, Dollar canadien, Franc suisse, Couronne suédoise et Couronne danoise.

Pour changer de devise, appuyez sur le bouton du milieu.

La dernière devise sélectionnée est gardée en mémoire lors des prochaines utilisations.


7.3 - Dictaphone

Par défaut, cette rubrique est masquée sur l'écran d'accueil. Pour la rendre visible, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Écran d'accueil : personnalisation.

Créer un nouvel enregistrement

Pour créer un nouvel enregistrement, sélectionnez « Créer un nouvel enregistrement ». L'enregistrement démarre automatiquement.

Pendant l'enregistrement, vous avez la possibilité de mettre le dictaphone en pause en appuyant avec un doigt n'importe où sur l'écran. Au-delà de 2 minutes de pause, l'enregistrement est automatiquement sauvegardé. Pour redémarrer l'enregistrement, appuyez de nouveau n'importe où sur l'écran.

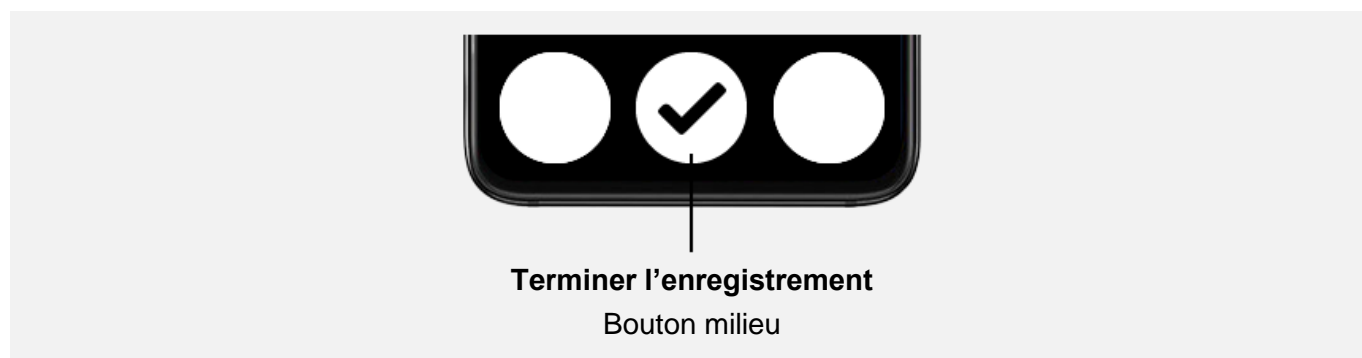


Pour terminer un enregistrement, appuyez sur le bouton du milieu.

Durée maximum de chaque enregistrement : 90 minutes.

Accéder aux enregistrements

Sont ensuite listés l'ensemble des enregistrements, classés du plus récent au plus ancien.

Une fois l'enregistrement choisi à l'écran, la barre de navigation change.

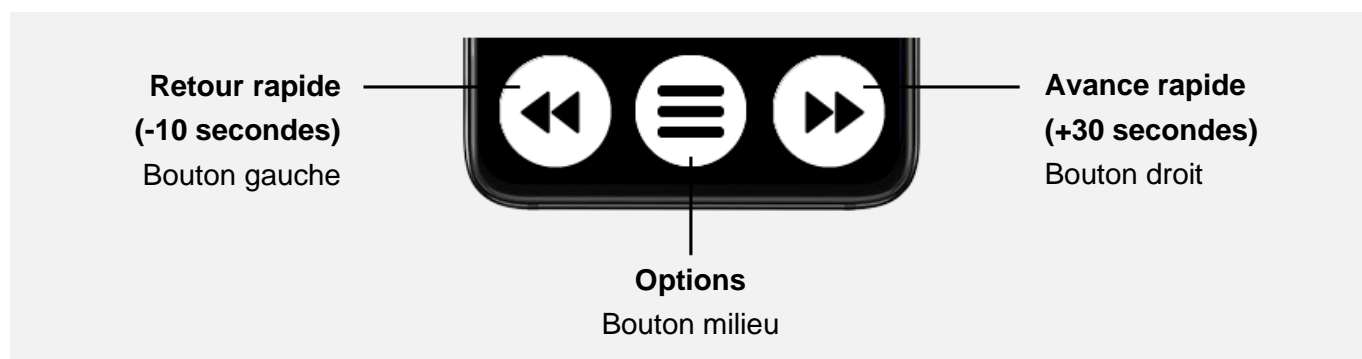

Pause / lecture : Appui avec un doigt n'importe où sur l'écran.

Options :

- Renommer (avec saisie vocale)
- Supprimer

7.4 - Branchement à un ordinateur

Vous avez la possibilité de brancher votre VoxiVision à un ordinateur. Reliez le câble USB Type-C fourni entre le port USB Type-C de votre VoxiVision (situé sur la tranche du bas, au milieu) et le port USB de votre ordinateur.

A noter que votre VoxiVision doit être allumé et pas en veille.

Une fois branché (votre appareil s'appellera VoxiVision sur votre ordinateur), vous aurez alors accès au contenu du Stockage interne de votre VoxiVision. Ouvrez le dossier VoxiVision.

- Textes : Dossier *ocr* (fichier au format txt)
- Traductions : Dossier *translation* (fichier au format txt)
- Images : Dossier *images* (fichier au format jpg)
- Enregistrements dictaphone : Dossier *voice-recorder* (fichier au format mp3)
- Code-barres personnalisés : Dossier *barcode* (fichier au format mp3)
- Etiquettes vocales : Dossier *labels* (fichier au format mp3)

Sur Mac, il faut au préalable télécharger un programme qui s'appelle Android File Transfer (<https://www.android.com/filetransfer>) pour effectuer la liaison.

8/ MODE SIMPLIFIÉ

Le mode simplifié propose une version plus simple de la machine à lire avec les fonctions essentielles ainsi qu'un accès au lecteur de code-barres.

Pour activer le mode simplifié, allez dans Paramètres > Mode simplifié.

Une fois dans le mode simplifié, faites un appui long avec un doigt sur l'écran pour passer de la Machine à lire au lecteur de code-barres et inversement.

Machine à lire

Lecture automatique (avec le support)

Posez votre VoxiVision sur le plateau en bois, dès que vous entendez « Lecture automatique activée », vous pouvez alors positionner votre document sur le plateau métallique.

Pendant la lecture du document, vous pouvez utiliser vos mains (à plat au-dessus du document) pour déclencher certaines actions :

- Main droite : Met en pause / Reprend la lecture
- Main gauche : Relit la phrase précédente

Pour arrêter la lecture, retirez le document du support. Le VoxiVision est prêt pour lire le prochain document.

Lecture manuelle (tenu en main)

Pour lancer la reconnaissance de texte, appuyez sur le bouton du milieu dans la barre de navigation.

La lecture démarre automatiquement.

Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyez avec un doigt sur l'écran.

Lors de la lecture d'un texte, la barre de navigation change.



Les fonctions sauvegarde, traduction et extraction intelligente ne sont pas disponibles en mode simplifié.

Lecteur de code-barres

Vous pouvez utiliser le lecteur de code-barres tenu en main ou sur le support.

Tenez le produit à au-moins 15 cm du VoxiVision puis présentez les différentes faces de votre produit jusqu'à entendre un bip sonore indiquant qu'un code-barres a été détecté. La synthèse vocale annonce alors le nom du produit identifié.

Commandes vocales

- « **machine à lire** » : lancer la machine à lire
- « **code barres** » : lancer le lecteur de code-barres
- « **pause** » : mettre en pause la lecture
- « **lecture** » : relancer la lecture
- « **précédent** » : phrase précédente
- « **suivant** » : paragraphe suivant

- « **contraste** » : changer le contraste
- « **taille texte** » : changer la taille du texte
- « **synthèse vocale** » : changer la synthèse vocale
- « **vitesse de lecture** » : régler la vitesse de lecture
- « **éclairage** » : activer / désactiver l'éclairage
- « **luminosité** » : régler la luminosité
- « **bouton** » : associer le bouton VoxiVision
- « **bluetooth** » : accéder au Bluetooth

- « **veille** » : mettre en veille
- « **éteindre** » : éteindre
- « **batterie** » : indique le niveau de batterie
- « **heure** » : indique l'heure
- « **date** » : indique la date

Pour quitter le mode simplifié, faites un appui long sur le bouton Marche / Arrêt situé sur le côté droit du VoxiVision, et choisissez « Quitter le mode simplifié ».

9/ PARAMETRES

Accessibilité

Votre VoxiVision s'adapte entièrement à vous.

Contraste

Choix parmi 6 contrastes : Texte blanc sur fond noir, Texte noir sur fond blanc, Texte jaune sur fond noir, Texte noir sur fond jaune, Texte jaune sur fond bleu, Texte bleu sur fond jaune

Taille texte

Choix parmi 6 tailles : Normal (x1), Moyen (x1,5), Grand (x2), Très grand (x2,5), Très très grand (x3,5), Énorme (x5)

Espacement texte

Choix parmi 3 tailles : Normal, Espacé, Très espacé

Synthèse vocale

Choix parmi 4 voix (3 voix Femme et 1 voix Homme).
Possibilité de désactiver / activer la synthèse vocale.

Vitesse de lecture (de la synthèse vocale)

Choix parmi 25 vitesses (de x0.1 à x4).

Luminosité

Permet de régler le niveau de luminosité (entre 1 et 8).
A noter que la désactivation complète de l'écran n'est pas possible.

Texte sur une ligne

Affiche les écrans de texte sur une seule ligne.
Un appui prolongé avec un seul doigt sur l'écran permet d'activer / désactiver la synthèse vocale.

Paramètres avancés

- Écran d'accueil : Personnalisation
- Machine à lire : Fonctions avancées (activation Traducteur et Extraction intelligente)
- Machine à lire : Lecture par mot / caractère
- Loupe : Personnalisation filtres
- Éclairage automatique
- Confirmation suppression

Éclairage automatique

Votre VoxiVision bénéficie d'un capteur de basse lumière qui corrige automatiquement la luminosité dans un environnement sombre. Cependant cela peut s'avérer insuffisant, et un éclairage peut être nécessaire.

Pour activer l'éclairage automatique, allez dans Paramètres > Paramètres avancés > Éclairage automatique et choisissez Activer. En cas de faible luminosité dans votre environnement, l'éclairage s'allumera alors automatiquement (non disponible dans la Loupe).

Vous pouvez néanmoins activer manuellement l'éclairage via la commande vocale.



DITES

« **éclairage** » : activer / désactiver l'éclairage

Connexions

Wi-Fi

Par défaut, le Wi-Fi est désactivé. Pour utiliser le Wi-Fi, choisissez le menu « Activer le Wi-Fi ».

Pour vous connecter à un nouveau réseau, vous avez 2 possibilités :

- Via un QR code Wi-Fi (souvent collé au dos de votre box Internet) : Choisissez le menu « Scanner un QR code » et passez votre VoxiVision devant le QR code. La connexion s'établit automatiquement.
- Via la liste des réseaux Wi-Fi disponibles : Choisissez le menu « Réseaux disponibles » puis sélectionnez le réseau désiré dans la liste. Saisissez ensuite la clé Wi-Fi (à l'aide du clavier T9), puis validez. Si la clé Wi-Fi est correcte, la connexion s'établit automatiquement.

Pour se reconnecter à un réseau déjà enregistré, allez dans la rubrique « Réseaux disponibles », sélectionnez le nom du réseau (indiqué par « (enregistré) » après le nom du réseau) puis choisissez « Se connecter au réseau ».

Pour supprimer un réseau, allez dans la rubrique « Réseaux disponibles », sélectionnez le nom du réseau puis choisissez « Oublier le réseau ».

Bluetooth

Par défaut, le Bluetooth est activé.

Si vous souhaitez ajouter un nouvel appareil audio Bluetooth, choisissez « Associer un nouvel appareil audio ». Votre VoxiVision va alors balayer tous les périphériques Bluetooth (appareil audio uniquement) disponibles autour de vous ; l'opération prend environ 20 secondes. Sélectionnez ensuite le nom du périphérique pour finaliser l'association.

Sont listés ensuite les appareils déjà connectés au moins une fois. En sélectionnant le nom d'un périphérique, vous avez la possibilité de le connecter, le déconnecter (si déjà connecté) ou de le dissocier.

Systeme

- Délai de mise en veille
- Orientation écran (portrait / paysage)
- Mise à jour code-barres
- Mise à jour billets
- Réglage heure
- Informations système
- Informations légales
- Réinitialisation

Mises à jour

Vous devez être connecté à Internet pour vérifier les mises à jour.

Si une mise à jour est disponible, vous aurez alors sur l'écran d'accueil une nouvelle rubrique « Mise à jour disponible ». Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

Fonctionnalités enrichies (si connexion à Internet)

Le VoxiVision fonctionne entièrement sans connexion Internet. Cependant une connexion Internet active permet d'enrichir certaines fonctions :

- Reconnaissance de texte : Meilleure détection des textes présents dans un document graphique et reconnaissance de l'écriture manuscrite.
- Traducteur : Amélioration de la qualité des traductions.
- Lecteur de code-barres : Base de données contenant plusieurs dizaines de millions de références et consultation des notices complètes pour les médicaments.

10/ COMMANDES VOCALES

Pour lancer une commande vocale, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt (situé sur la tranche droite de votre VoxiVision) ou sur le bouton VoxiVision.

Une fois que vous entendez un bip sonore (une animation micro se lance), vous pouvez parler. La reconnaissance vocale s'arrête dès que vous arrêtez de parler.

La liste complète des commandes vocales est disponible dans Aide > Commandes vocales



DITES

« **commandes vocales** » : lister toutes les commandes vocales

Lancer une fonction

- « **machine à lire** » : lancer la machine à lire
- « **multi-pages** » : lancer le mode multi-pages
- « **code barres** » : lancer le lecteur de code-barres
- « **loupe** » : lancer la loupe
- « **galerie** » : lancer la galerie
- « **étiquettes** » : lancer le lecteur d'étiquettes
- « **billet** » : lancer le détecteur de billets
- « **dictaphone** » : lancer le dictaphone
- « **paramètres** » : accéder aux paramètres
- « **aide** » : lancer l'aide

Navigation

- « **accueil** » : retourner à l'accueil
- « **retour** » : revenir à l'écran précédent
- « **pause** » : mettre en pause, lors de la lecture d'un document
- « **lecture** » : relancer la lecture, lors de la lecture d'un document
- « **valider** » : valider le choix, dans un menu
- « **veille** » : mettre en veille
- « **éteindre** » : éteindre

Fonctions avancées

- « **sauvegarder** » : sauvegarder le document (machine à lire, multi-pages, galerie)
- « **précédent** » : phrase précédente (machine à lire, galerie)
- « **suivant** » : paragraphe suivant (machine à lire, galerie)
- « **début** » : atteindre le début du document (machine à lire, galerie)
- « **traduire** » : lancer le traducteur (machine à lire, galerie)
- « **traduire vers + langue** » : traduire dans la langue (machine à lire, galerie)
- « **extraction intelligente** » : lancer l'extraction intelligente (machine à lire, galerie)
- « **éclairage** » : activer / désactiver l'éclairage (machine à lire, multi-pages, code-barres, loupe, étiquettes, billets de banque)
- « **zoom x[1-25]** » : zoomer au niveau [1-25] (loupe)
- « **gel** » : geler l'image (loupe)
- « **lire** » : déclencher la lecture du texte (quand image gelée dans loupe)
- « **page numéro [chiffre]** » : atteindre la page [chiffre] (galerie > multi-pages)

Paramètres

- « **contraste** » : changer le contraste
- « **taille texte** » : changer la taille du texte
- « **synthèse vocale** » : changer la synthèse vocale ou la désactiver
- « **désactiver synthèse vocale** » : désactiver la synthèse vocale (passe en mode visuel)
- « **activer synthèse vocale** » : activer la synthèse vocale
- « **vitesse de lecture** » : régler la vitesse de lecture
- « **luminosité** » : régler la luminosité
- « **bouton** » : associer le bouton VoxiVision
- « **wifi** » : accéder au Wi-Fi
- « **bluetooth** » : accéder au Bluetooth
- « **volume plus** » : augmenter le volume de 10%
- « **volume moins** » : diminuer le volume de 10%

Informations

- « **batterie** » : indique le niveau de batterie
- « **volume** » : indique le volume actuel
- « **heure** » : indique l'heure
- « **date** » : indique la date

INFORMATIONS TECHNIQUES

Langues supportées : Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais.

Langues traducteur : Français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe, japonais, chinois, thaï.



Des solutions pour un challenge visuel

Des questions de fond ou techniques sur ce produit?
Vous ne trouvez pas la réponse dans ce manuel?
Alors le service après-vente de Sensotec s.a.
est là pour vous aider.

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60

Sensotec Antwerpen
Kempenstraat 100
B-2030 Antwerpen
T+32 3 828 80 15