



VoxiVision

Voorleestoestel &
Draagbare beeldschermloep






Wanneer je dit symbool in de handleiding ziet, geeft het aan dat er een spraakopdracht is gekoppeld aan een actie.

1/ EERSTE STAPPEN

Inhoud van de doos


- VoxiVision (met beschermend omhulsel)
- Opvouwbaar standaard + opberghoes
- Accessoires
 - Afneembare polsband
 - Netoplader + USB Type-C-kabel
 - QR-code-etiketten x50
 - VoxiVision-knop

VoxiVision

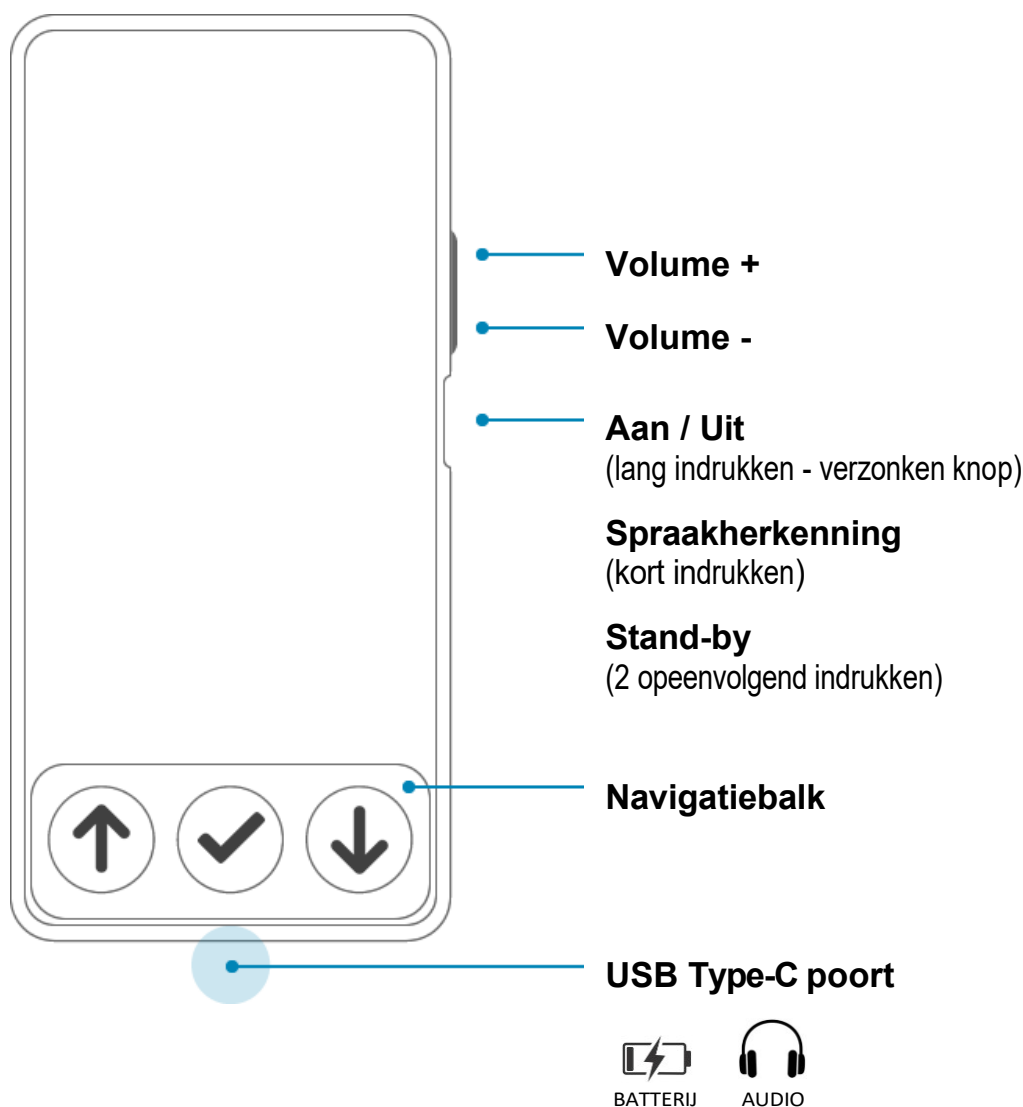

Inklapbare standaard

De inklapbare standaard bestaat uit 3 onderdelen: de houten standaard waarop de VoxiVision wordt geplaatst, de verticale basis (uitgerust met een roterende stop) en de metalen plaat (met een QR-code) waarop het document wordt geplaatst.

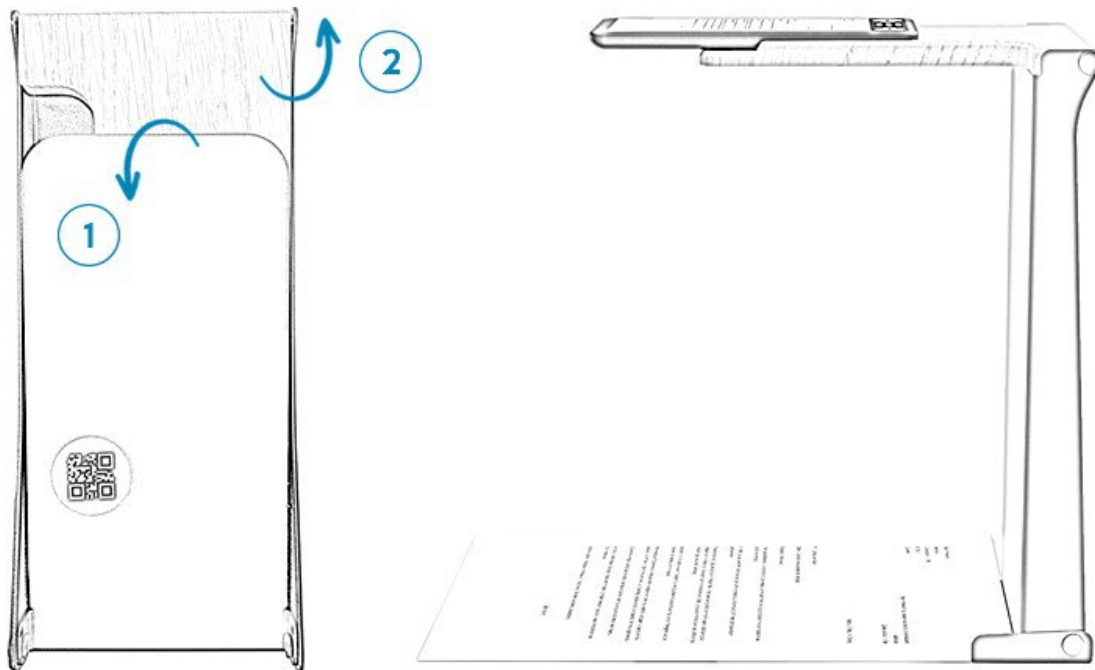

Stappen om de standaard uit te

klappen : 1 - Pak de metalen plaat vast

- Beweeg het weg van de houten steun: op dit punt wordt weerstand uitgeoefend
- Draai het een kwartslag totdat het niet meer beweegt (je voelt dan een klik).

2 - Pak de houten steun vast


- Draai het $\frac{3}{4}$ slag tot het niet meer beweegt.

Plaats de metalen plaat en de houten steun met de voorkant naar je toe.

Om een document perfect te positioneren, kunt u de steun onderaan de verticale voet aan de rechterkant verlagen.

VoxiVision-knop

Met de VoxiVision-knop kun je spraakherkenning activeren, of de VoxiVision nu op de standaard staat of niet.

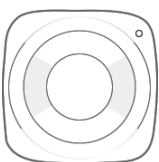

Om de knop aan te sluiten, drukt u kort op de aan/uit-knop aan de rechterkant van het apparaat en zegt u "knop". Volg vervolgens de instructies.

Aan / Uit

Om je VoxiVision in te schakelen, houd je de Start/Stop-knop (aan de rechterkant onder de volumetoetsen) ingedrukt totdat je een trilling voelt. Het opstarten duurt minder dan een minuut. Als de VoxiVision niet aangaat, vergeet dan niet om hem op te laden.

Telkens als hij opstart, start VoxiVision direct op in de leesmakinemodus (in plaats van op het beginscherm).

Om uw VoxiVision uit te schakelen, houdt u de Aan/Uit-toets ingedrukt. U krijgt dan een bevestigingsscherm te zien met de vraag of u wilt uitschakelen.



ZEG:

"Uitschakelen" : schakel de VoxiVision uit

Stand-by / Stand-by verlaten

Druk twee keer achter elkaar op de aan/uit-knop om over te schakelen naar stand-by.

VoxiVision gaat standaard in stand-by na 2 minuten inactiviteit (dit kan worden gewijzigd in Geavanceerde instellingen).



ZEG:

"stand-by": op stand-by zetten

Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de stand-bymodus te verlaten.

Navigatie

Druk met 2 vingers op het scherm om terug te keren naar het vorige scherm.



Onderaan het VoxiVision-scherm bevindt zich de navigatiebalk, met 3 knoppen (ingesprongen, gemakkelijk te vinden met de vingergeleider). Gebruik deze 3 knoppen om alle handelingen op uw VoxiVision uit te voeren.



Afhankelijk van het scherm kunnen het uiterlijk en de functies van de 3 knoppen veranderen.

Spraakopdrachten

Je kunt je apparaat ook met je stem bedienen met spraakopdrachten (zie hoofdstuk 10).

Om een spraakopdracht te starten, drukt u kort op de Aan/Uit-knop (aan de rechterkant van uw VoxiVision). Zodra u een pieptoon hoort (een animatie met een knipperende microfoon start op), kunt u spreken. De spraakherkenning stopt zodra u stopt met spreken.

Laden

Om je VoxiVision op te laden, sluit je de oplader aan op de USB Type-C poort van je VoxiVision (aan de middelste onderkant).

Als de batterij onder de 20% komt, zie je een melding op het startscherm.

Gebruik spraakherkenning om op elk moment je batterijniveau te controleren.



ZEG:

"Batterij": de batterijstatus opvragen

2/ LEESMACHINE

Automatisch afspelen (met media)

Deze functie maakt het luisteren naar een document heel eenvoudig: leg je document neer en het begint automatisch te spelen.

Ga naar het gedeelte Leesmachine. Plaats uw VoxiVision op de houten schaal en zodra u "Automatisch lezen geactiveerd" hoort, kunt u uw document op de metalen schaal plaatsen.

Automatisch lezen start onmiddellijk. Om je te helpen je documenten correct te plaatsen, start autoplay alleen als er geen hand wordt gedetecteerd boven het document.

VoxiVision kan documenten detecteren en lezen in hun oorspronkelijke taal (zie ondersteunde talen aan het einde van de handleiding).

Om het afspelen te stoppen, verwijdert u het document uit de mediacassette. De VoxiVision is dan klaar voor de volgende automatische lezing.

Bedieningselementen tijdens het afspelen

Terwijl je het document leest, kun je je handen gebruiken om bepaalde acties te starten.

Pauzeren/hervatten van het afspelen



Plaats rechter hand boven het document

Herlees de vorige zin



Linkerhand op het document plaatsen

Het document opslaan



Rechter vuist gesloten boven het document houden

Merk op dat zolang je je linkerhand boven het document houdt, je van zin naar zin gaat.

Of via spraakopdrachten:

ZEG:



"pause" / "play": afspelen pauzeren of hervatten

"vorige": luister naar de vorige zin

"Opslaan": het document opslaan

Handmatig afspelen (zonder media)

VoxiVision kan ook zonder standaard in de hand worden gebruikt.

Druk op de middelste knop op de navigatiebalk om de tekstherkenning te starten.




Tekstherkenning starten

Middelste knop

Het afspelen start automatisch.

Om het lezen te pauzeren of te hervatten, druk je met je vinger ergens op het scherm. Tijdens het lezen van tekst verandert de navigatiebalk.

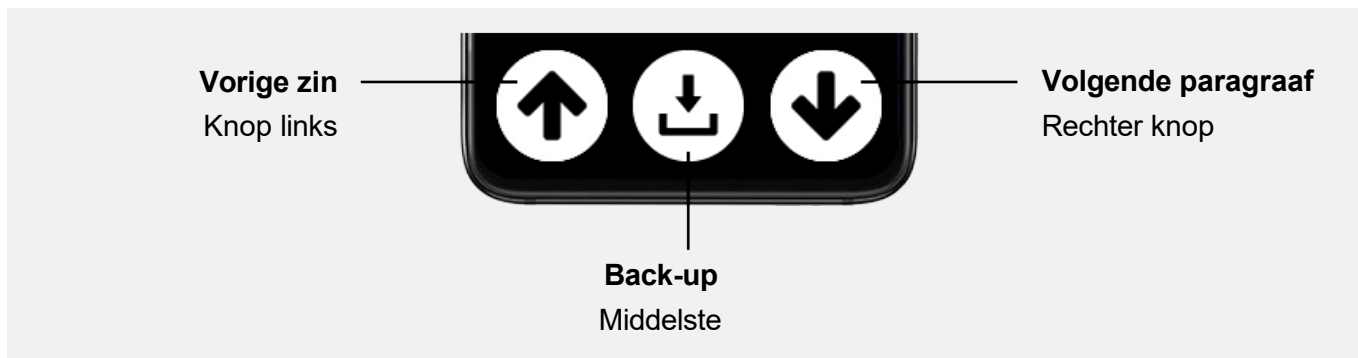


Geavanceerde opties (vertaler en intelligente extractie)

De leesmachine biedt geavanceerde functies die standaard niet geactiveerd zijn. Om ze te activeren ga je naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Geavanceerde functies leesmachine en kies je voor Activeren.

Werkt niet als de VoxiVision op de houder staat, maar is alleen beschikbaar tijdens handmatig afspelen.

In deze configuratie geeft de middelste knop toegang tot de opties.

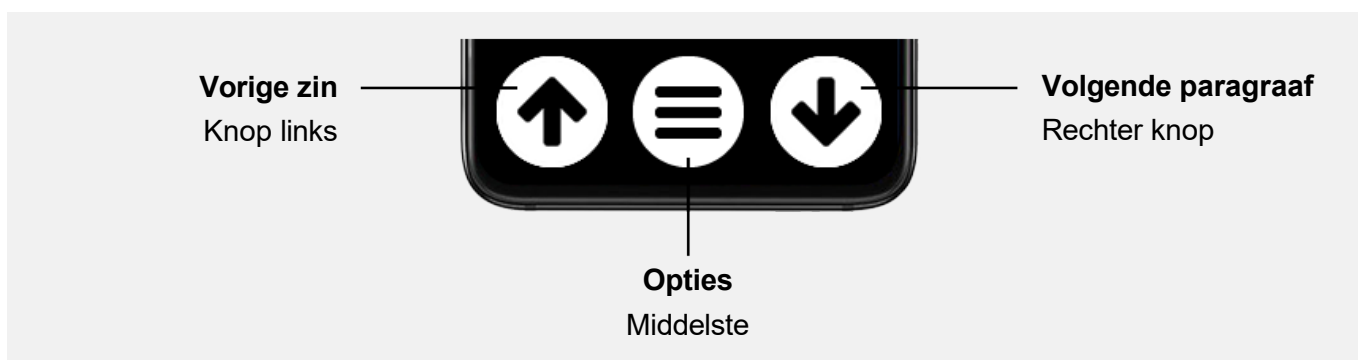

Met de opties kun je :

- Opslaan: Opslaan in de Galerij (map Tekstherkenning)
- Vertalen: Vertaling in 10 talen mogelijk
- Intelligente extractie: Automatische detectie van telefoonnummers, postadressen en e-mailadressen in tekstherkenningresultaten. Wordt alleen weergegeven als er resultaten worden gedetecteerd.

Lezen op woord/teken

Om deze functie te activeren, ga je naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Leesmachine Lezen op woord / teken.

In het scherm met de tekstherkenningresultaten drukt u lang met een vinger op het scherm om het lezen van woorden/tekens te activeren. Vanaf dan kunt u van woord naar woord gaan met behulp van de pijlen in de navigatiebalk.

Als je op een woord stopt, wordt het automatisch gespeld.

Vorig woord
Knop links



Volgende woord

Om woord-voor-woord lezen uit te schakelen, houd je het scherm opnieuw ingedrukt met één vinger. Werkt ook in de Galerij.

3/ MEERDERE PAGINA'S

Met de modus voor meerdere pagina's kun je tekst uit meerdere documenten achter elkaar extraheren en in één document opslaan.

Deze rubriek is standaard verborgen op het beginscherm. Om het zichtbaar te maken, gaat u naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Beginscherm: personalisatie.

Ga naar de sectie Meerdere pagina's. Plaats uw VoxiVision op de houten lade. Zodra u "Multi-page modus geactiveerd" hoort, kunt u uw document op de metalen lade plaatsen.

Het document wordt automatisch gedetecteerd en de analyse van deze eerste pagina begint. Om je in staat te stellen je documenten correct te plaatsen, start de verwerking alleen als er geen hand wordt gedetecteerd boven het document. Zodra de bewerking is voltooid, wordt u gevraagd een nieuw document te plaatsen of op te slaan.

Verwijder het document volledig uit de lade en plaats uw nieuwe document. Het scannen start automatisch en duurt enkele seconden. U kunt de handeling herhalen tot een maximum van 50 pagina's.

Als je echter je handen nodig hebt om het document plat te houden, kun je de verwerking van het document forceren met het spraakcommando "lezen".

Je hebt 2 opties om op te slaan:

- Een gebaar maken: Plaats je gesloten rechter- of linkervuist over je document.
- Via spraakopdracht: zeg "opslaan".

Als er na 2 minuten geen activiteit wordt waargenomen, wordt het huidige document automatisch opgeslagen.

Het document wordt opgeslagen in de Galerij, in de map Tekstherkenning, met het voorvoegsel "multipagina's" gevolgd door een nummer.

4/ BARCODELEZER

Met de barcodelezer kun je alledaagse producten scannen (voedsel, medicijnen, hygiëne- en schoonheidsproducten, enz).

Plaats uw VoxiVision ten minste 15 cm boven uw product. Houd de verschillende zijden van uw product omhoog totdat u een piepton hoort die aangeeft dat er een barcode is gedetecteerd.

Gebruik met de standaard (scannermodus)


Voor extra gebruiksgemak kan de VoxiVision ook gebruikt worden met de standaard. Plaats de VoxiVision op de houten standaard, met de QR-code op de bodemplaat zichtbaar. Na een paar seconden hoor je "Scannermodus geactiveerd".

Haal je producten onder de VoxiVision door. Zodra een barcode wordt herkend, wordt de informatie gelezen en weergegeven (het scherm draait dan naar je toe).

Barcode aanpassen / Een nieuwe barcode toevoegen

Met deze functie kun je met je stem informatie toevoegen aan een bestaande barcode, of je eigen barcodes toevoegen als de barcode onbekend is.

Zodra het resultaat van een streepjescode bekend is, druk je op de middelste knop Opties en kies je Aanpassen.

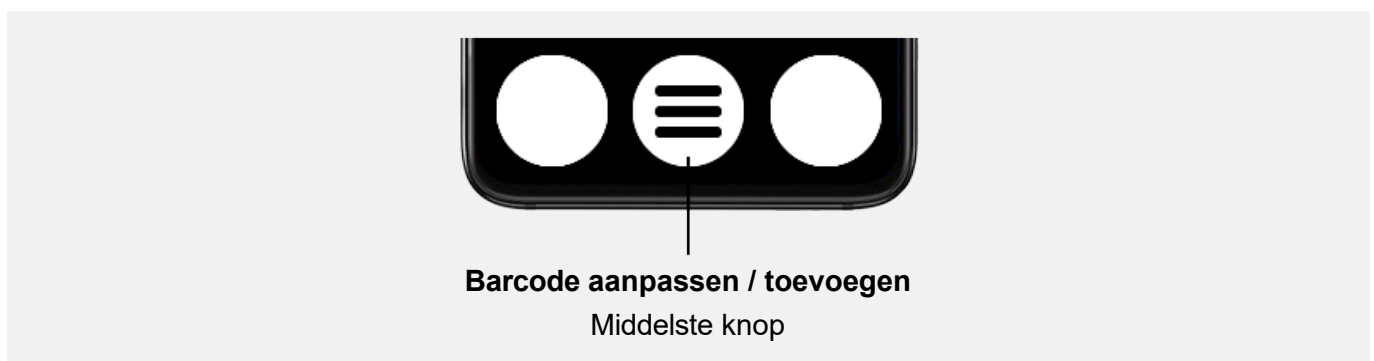

Spraakopname start automatisch. Maximale lengte van elke opname: 1 minuut.

De volgende keer dat u de barcode scant, hoort u uw stemopname voorafgegaan door de naam van het product (als er een bestaande barcode is).

Door op de middelste knop (pullenbakpictogram) te drukken, kun je je opname verwijderen.

In het geval van barcodepersonalisatie wordt alleen uw record verwijderd en niet het product uit de database.


Update barcodedatabase

Om te controleren of er een update van de barcodedatabase beschikbaar is, ga je naar Instellingen > Systeem > Barcode update.

Je moet verbonden zijn met het internet (zie Hoofdstuk 9 - Instellingen en dan Verbindingen).

5/ Vergrootglas

Het vergrootglas kan in staande of liggende modus worden gebruikt.

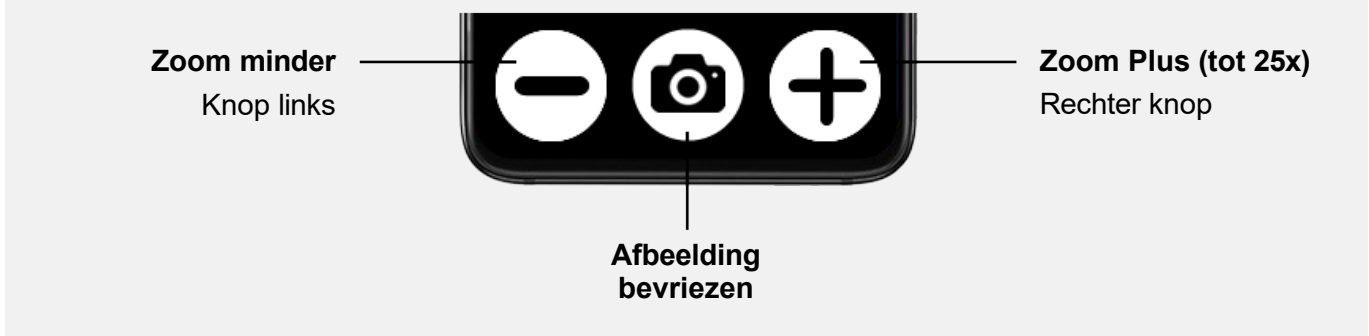

Je kunt inzoomen met de knoppen links en rechts.

Afbeelding bevroren

Om het beeld stil te zetten, druk je op de middelste knop die wordt weergegeven door een camera.

Zodra het beeld bevroren is, kun je in- en uitzoomen (knoppen rechts en links) en rond het beeld bewegen (met een vinger op het scherm). Of knijp direct met 2 vingers in het scherm.


Je kunt ook tekstextractie starten met spraakopdrachten.



ZEG:

"lezen": haal de tekst uit de afbeelding (alleen beschikbaar als de afbeelding bevroren

is)

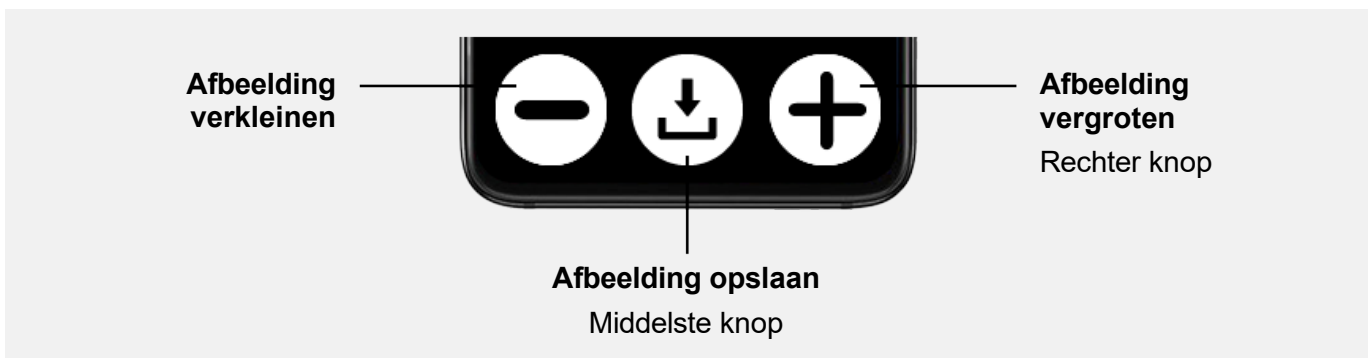

Druk op de middelste knop om de afbeelding op te slaan. De afbeelding wordt opgeslagen in de map Galerij, Afbeeldingen. Gebruik het gebaar Terug (druk met 2 vingers op het scherm) om de bevroeringsmodus te verlaten.

Filters

Door op de volumetoetsen aan de rechterkant van de VoxiVision te drukken, kunt u de filter wijzigen (voor of na het bevroren van het beeld).

Naast de natuurlijke kleur kun je kiezen uit 6 verschillende filters.

Standaard wordt de laatst gebruikte filter opgeslagen. Op dat moment staan de filters in de volgende volgorde: je opgeslagen filter, natuurlijke kleur en dan de lijst met andere filters.

U kunt de lijst met filters aanpassen in de geavanceerde instellingen (Instellingen > Geavanceerde instellingen > Vergrootglas Pas filters aan).


6/ GALERIJ

In de galerij kun je tekstbestanden bekijken die zijn opgeslagen in de Leesmachine of Multi-pagina en afbeeldingen die zijn opgeslagen in het Vergrootglas.

Tekstbestand (map Tekstherkenning)

Bestanden worden gesorteerd van meest recent naar oudst. Selecteer het bestand dat je wilt bekijken uit de lijst.

Zodra de tekst op het scherm staat, verandert de navigatiebalk.

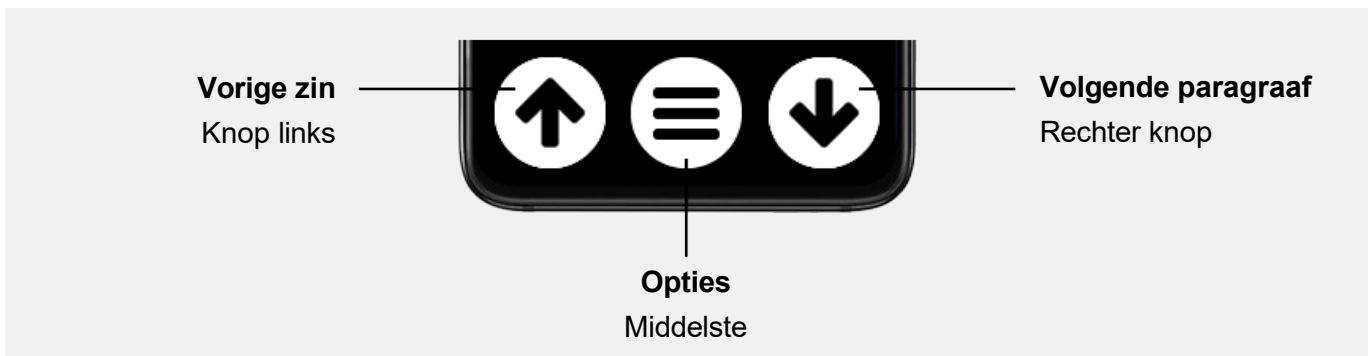

Met de opties kunt u :

- Hernoemen (met spraakinvoer)
- Verwijder
- Vertalen (als de geavanceerde functies van de leesmachine zijn ingeschakeld)
- Intelligente extractie (als de geavanceerde functies van de leesmachine ingeschakeld zijn) : Automatische detectie van telefoonnummers, postadressen, e-mailadressen aanwezig in het tekstherkenningresultaat. Wordt alleen weergegeven als er resultaten worden gedetecteerd.

Tekst op meerdere pagina's

Teksten opgeslagen in de Multi-page modus (bestandsnaam beginnend met *multipagina's*) bieden geavanceerde functies die niet beschikbaar zijn voor eenvoudige tekstbestanden :

- Afspelen hervatten: hiermee kunt u het afspelen starten en hervatten op het punt waar u was gebleven de volgende keer dat u de video bekijkt.
- Navigatie per pagina: Houd de pijlen omhoog of omlaag ingedrukt om naar de vorige of volgende pagina te gaan.


Vertalingen

Als je minstens één vertaling hebt opgeslagen, zal de map Vertalingen (in de root van Galerie) zichtbaar zijn in de galerij.

Afbeeldingsbestand (map Afbeeldingen)

Afbeeldingen worden gesorteerd van meest recent naar oudst. Selecteer de afbeelding die je wilt bekijken uit de lijst.

Zodra de afbeelding op het scherm staat, verandert de navigatiebalk.

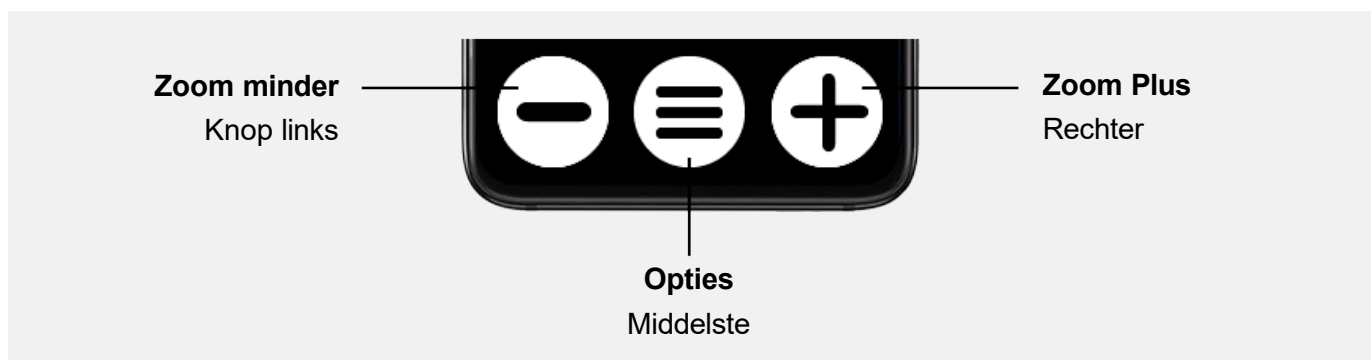

Met de opties kun je :

- Tekst uitpakken (kan worden opgeslagen en vertaald)
- Hernoemen (met spraakinvoer)
- Verwijder

7/ ANDERE FUNCTIES

7.1 - Etiketten lezen/schrijven

Met de labelreader-recorder kun je een product van een spraaklabel voorzien met behulp van de meegeleverde labels (x50). Deze labels zijn koude- en waterbestendig en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt.

Deze rubriek is standaard verborgen op het beginscherm. Om het zichtbaar te maken, gaat u naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Beginscherm: aanpassen.

Labelregistratie

Neem een van de labels van het labelvel en ga met uw VoxiVision over het label (zorg ervoor dat u uw apparaat op ten minste 15 cm van het label plaatst).


Zodra het label wordt gedetecteerd, voel je een trilling. Start en stop je stemopname door op de middelste microfoonknop te drukken.

Maximale lengte van elke opname: 1 minuut.

Etiketten lezen

Als u met uw VoxiVision over een tag gaat die al is opgenomen, voelt u een trilling en wordt de bijbehorende opname automatisch afgespeeld.

Druk met je vinger op het scherm om het label opnieuw te beluisteren.

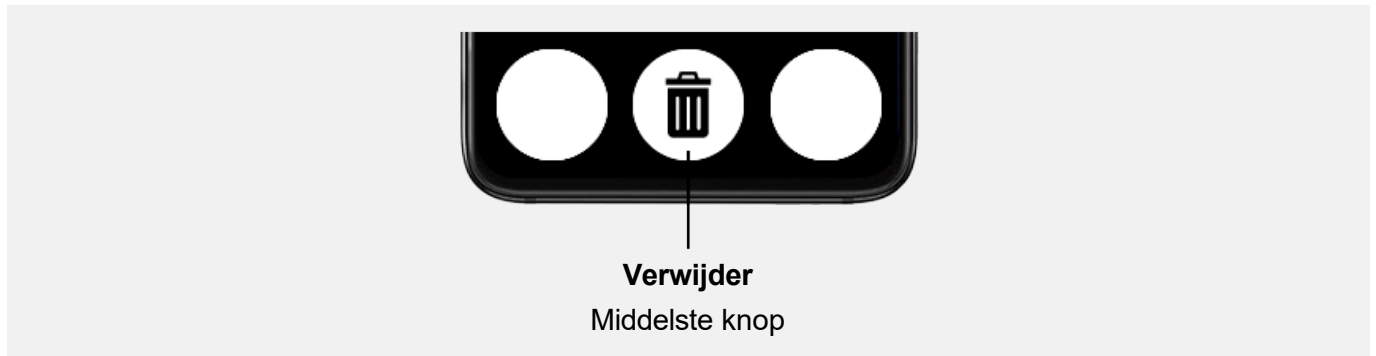

Met de opties kunt u :

- Verwijder

7.2 - Bankbiljet detector

Deze rubriek is standaard verborgen op het beginscherm. Om het zichtbaar te maken, gaat u naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Beginscherm: personalisatie.

Plaats een bankbiljet voor VoxiVision en de waarde ervan wordt onmiddellijk in grote letters op het scherm weergegeven en vocaal aangekondigd.

Naast de euro biedt de detector 6 valuta's: Britse pond, Amerikaanse dollar, Canadese dollar, Zwitserse frank, Zweedse kroon en Deense kroon.

Druk op de middelste knop om de valuta te wijzigen.

De laatst geselecteerde valuta wordt bewaard voor toekomstig gebruik.


7.3 - Dictafoon

Deze rubriek is standaard verborgen op het beginscherm. Om het zichtbaar te maken, gaat u naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Beginscherm: personalisatie.

Een nieuw record maken

Om een nieuwe opname te maken, selecteer je "Een nieuwe opname maken". De opname wordt automatisch gestart.

Tijdens het opnemen kun je de recorder pauzeren door met je vinger ergens op het scherm te drukken. Als u langer dan 2 minuten pauzeert, wordt de opname automatisch opgeslagen. Om de opname opnieuw te starten, drukt u opnieuw op een willekeurige plek op het scherm.

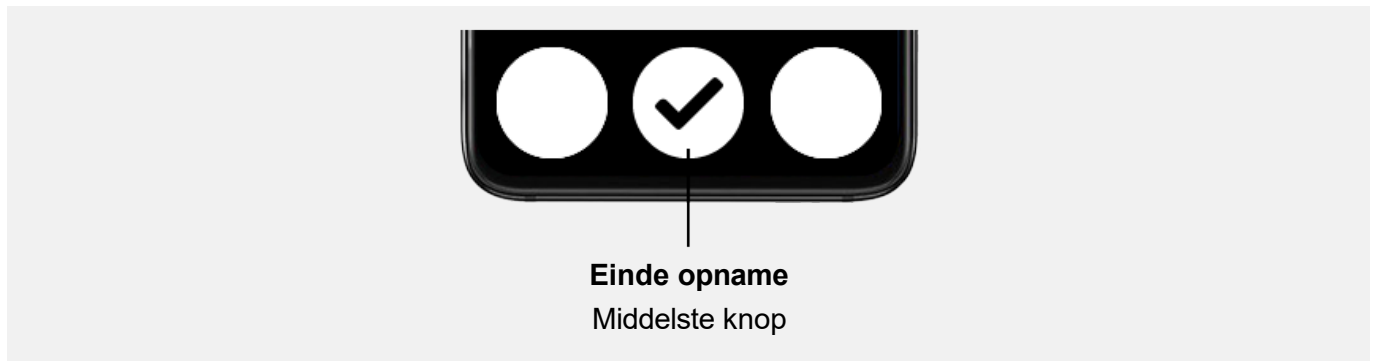


Druk op de middelste knop om een opname te beëindigen.

Maximale lengte van elke opname: 90 minuten.

Toegang tot opnames

Alle opnames worden dan weergegeven, van de meest recente tot de oudste. Zodra u een opname op het scherm hebt geselecteerd, verandert de navigatiebalk.

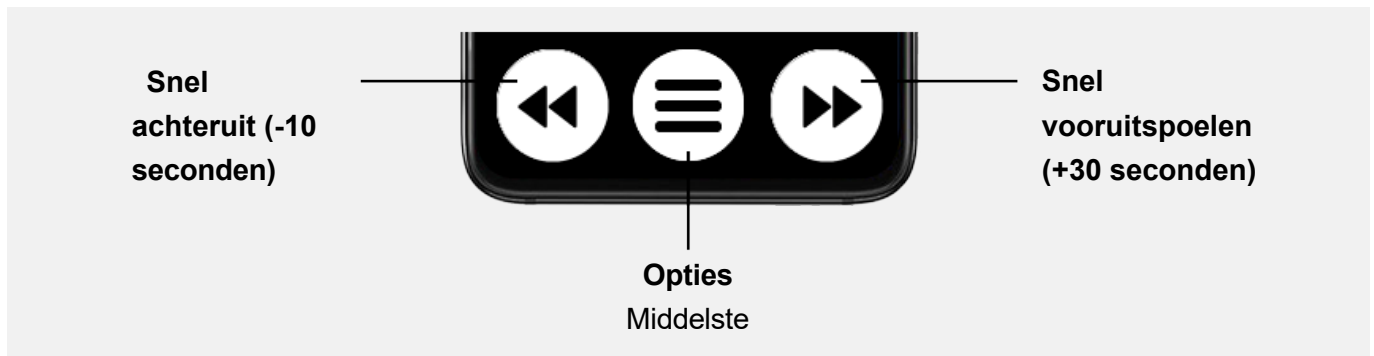

Pauzeren / afspelen: Druk met een vinger ergens op het scherm.

Opties:

- Hernoemen (met spraakinvoer)
- Verwijder

7.4 - Aansluiting op een computer

U kunt uw VoxiVision aansluiten op een computer. Sluit de meegeleverde USB Type-C kabel aan tussen de USB Type-C poort op uw VoxiVision (aan de middelste onderkant) en de USB-poort op uw computer.

Let op: uw VoxiVision moet aan staan en niet op stand-by.

Eenmaal aangesloten (je toestel zal VoxiVision heten op je computer), heb je toegang tot de inhoud van de interne opslag van je VoxiVision. Open de VoxiVision map.

- Teksten : *ocr-bestand* (txt-formaat)
- Vertalingen : Map met *vertalingen* (bestand in txt-indeling)
- Afbeeldingen: map *Afbeeldingen* (bestand in jpg-indeling)
- Dictafoonopnamen: map met *voicerecorder* (bestand in mp3-indeling)
- Aangepaste barcodes : Map *met streepjescodes* (bestand in mp3-formaat)
- Stemlabels: Map *Labels* (bestand in mp3-indeling)

Op de Mac moet je eerst een programma downloaden genaamd Android File Transfer (<https://www.android.com/filetransfer>) om de verbinding tot stand te brengen.

8/ VEREENVOUDIGDE MODUS

De vereenvoudigde modus biedt een eenvoudigere versie van de leesmachine met de essentiële functies plus toegang tot de barcodelezer.

Ga naar Instellingen > Vereenvoudigde modus om de vereenvoudigde modus te activeren.

In de vereenvoudigde modus kun je het scherm met één vinger ingedrukt houden om over te schakelen van de leesmachine naar de barcodescanner en vice versa.

Leesmachine

Automatisch afspelen (met media)

Plaats uw VoxiVision op de houten lade en zodra u "Autoplay activated" hoort, kunt u uw document op de metalen lade plaatsen.

Tijdens het lezen van het document kun je je handen (plat op het document) gebruiken om bepaalde acties te starten:

- Rechterhand: Pauzeren/hervatten van het afspelen
- Linkerhand: Herleest de vorige zin

Om het lezen te stoppen, verwijdert u het document van de standaard. VoxiVision is klaar om het volgende document te lezen.

Handmatig aflezen (handheld)

Druk op de middelste knop op de navigatiebalk om de tekstherkenning te starten.

Het afspelen start automatisch.

Druk met een vinger op het scherm om het lezen te pauzeren of te hervatten.

Tijdens het lezen van tekst verandert de navigatiebalk.

Vorige zin
Knop links



Volgende paragraaf
Rechter knop

De functies Opslaan, Vertalen en Intelligent extraheren zijn niet beschikbaar in de vereenvoudigde modus.

Barcodelezer

Je kunt de barcodelezer in je hand of op de standaard gebruiken.

Houd het product op minstens 15 cm afstand van de VoxiVision en houd vervolgens de verschillende zijden van uw product omhoog totdat u een pieptoon hoort die aangeeft dat er een streepjescode is gedetecteerd. De spraaksynthese kondigt vervolgens de naam van het geïdentificeerde product aan.

Spraakopdrachten

- **"leesmachine"**: start de leesmachine
- **"barcode"**: start de barcodelezer
- **"pauze"**: afspelen onderbreken
- **"Lezen"**: het lezen herlanceren
- **"vorige"**: vorige zin
- **"volgende"**: volgende alinea

- **"contrast"**: verander het contrast
- **"Tekstgrootte"**: wijzig de tekstgrootte
- **"Tekst-naar-spraak"**: de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen
- **"afspeelsnelheid"**: de afspeelsnelheid instellen
- **"verlichting"**: verlichting activeren/deactiveren
- **"Helderheid"**: de helderheid instellen
- **"Knop"**: associeer de VoxiVision-knop met een knop.
- **"Bluetooth"**: toegang tot Bluetooth

- **"stand-by"**: op stand-by zetten
- **"éteindre"**: uitschakelen
- **"batterij"**: geeft het batterijniveau aan
- **"tijd"**: geeft de tijd aan
- **"datum"**: geeft de datum aan

Om de vereenvoudigde modus te verlaten, houdt u de Start/Stop-toets aan de rechterkant van de VoxiVision ingedrukt en selecteert u "Exit simplified mode".

9/ PARAMETERS

Toegankelijkheid

Je VoxiVision past zich helemaal aan jou aan.

Contrast

Keuze uit 6 contrasten: Witte tekst op zwarte achtergrond, Zwarte tekst op witte achtergrond, Gele tekst op zwarte achtergrond, Zwarte tekst op gele achtergrond, Gele tekst op blauwe achtergrond, Blauwe tekst op gele achtergrond

Tekstgrootte

Keuze uit 6 maten: Normaal (x1), Medium (x1,5), Groot (x2), Extra groot (x2,5), Extra extra groot (x3,5), Enorm (x5)

Tekstafstand

Keuze uit 3 formaten: Normaal, Uit elkaar, Wijd uit elkaar

Spraaksynthese

Keuze uit 4 stemmen (3 vrouwelijke en 1 mannelijke).
Mogelijkheid om tekst-naar-spraak te deactiveren/activeren.

Leessnelheid (tekst-naar-spraak)

Keuze uit 25 snelheden (van x0,1 tot x4).

Helderheid

Wordt gebruikt om het helderheidsniveau in te stellen (tussen 1 en 8).
Het is niet mogelijk om het scherm volledig uit te schakelen.

Tekst op één regel

Geeft tekstschermen weer op een enkele regel.
Houd het scherm met één vinger ingedrukt om de tekst-naar-spraakfunctie te activeren/deactiveren.

Geavanceerde instellingen

- Beginscherm: Aanpassen
- Leesmachine: Geavanceerde functies (Vertaler en Intelligente extractie ingeschakeld)
- Leesmachine: Woord/teken lezen
- Vergrootglas: filters aanpassen
- Automatische verlichting
- Bevestiging van verwijdering

Automatische verlichting

Uw VoxiVision heeft een sensor voor weinig licht die automatisch de helderheid corrigeert in een donkere omgeving. Dit kan echter niet voldoende zijn en verlichting kan nodig zijn.

Om de automatische verlichting te activeren, ga je naar Instellingen > Geavanceerde instellingen > Automatische verlichting en kies je Activeren. Als er weinig licht is in je omgeving, wordt de verlichting automatisch ingeschakeld (niet beschikbaar in het vergrootglas).

Je kunt de verlichting echter handmatig activeren met het spraakcommando.



ZEG:

"Verlichting": verlichting activeren/deactiveren

Verbindingen

Wi-Fi

Wi-Fi is standaard uitgeschakeld. Om Wi-Fi te gebruiken, selecteer je het menu "Wi-Fi activeren". Je hebt 2 opties om verbinding te maken met een nieuw netwerk:

- Via een Wi-Fi QR-code (vaak geplakt op de achterkant van je internetbox): Kies het menu "Scan een QR code" en houd uw VoxiVision voor de QR code. De verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.
- Via de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken: Kies het menu "Beschikbare netwerken" en selecteer vervolgens het gewenste netwerk uit de lijst. Voer vervolgens de Wi-Fi-sleutel in (met het T9-toetsenbord) en bevestig. Als de Wi-Fi-sleutel correct is, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Om opnieuw verbinding te maken met een netwerk dat al geregistreerd is, ga je naar "Beschikbare netwerken", selecteer je de naam van het netwerk (aangegeven met "(geregistreerd)" achter de netwerknamen) en kies je vervolgens "Verbinden met netwerk".

Om een netwerk te verwijderen, ga je naar "Beschikbare netwerken", selecteer je de naam van het netwerk en kies je "Netwerk vergeten".

Bluetooth

Bluetooth is standaard geactiveerd.

Als u een nieuw Bluetooth-audioapparaat wilt toevoegen, selecteer dan "Nieuw audioapparaat koppelen". Je VoxiVision zal dan alle beschikbare Bluetooth-apparaten (alleen audioapparaat) om je heen scannen; deze handeling duurt ongeveer 20 seconden. Selecteer vervolgens de naam van het apparaat om het koppelen te voltooien.

Dit wordt gevolgd door een lijst met apparaten die al minstens één keer verbonden zijn geweest. Door de naam van een apparaat te selecteren, kun je het verbinden, ontkoppelen (als het al verbonden is) of ontkoppelen.

Systeem

- Stand-by tijd
- Schermstand (staand/landschap)
- Barcode bijwerken
- Tickets bijwerken
- Tijdstelling
- Systeeminformatie
- Juridische informatie
- Reset

Updates

Je moet verbonden zijn met het internet om te controleren op updates.

Als er een update beschikbaar is, zie je een nieuw kopje op het beginscherm "Update beschikbaar". Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

Verbeterde functies (indien verbonden met internet)

VoxiVision werkt volledig zonder internetverbinding. Een actieve internetverbinding kan echter worden gebruikt om bepaalde functies te verbeteren:

- Tekstherkenning: verbeterde detectie van tekst in een grafisch document en herkenning van handschrift.
- Vertaler: Verbeterde vertaalkwaliteit.
- Barcodelezer: Database met tientallen miljoenen referenties en raadpleging van volledige bijsluiters van geneesmiddelen.

10/ SPRAAKOPDRACHTEN

Om een spraakopdracht te starten, drukt u op de toets Start/Stop (aan de rechterkant van uw VoxiVision) of op de VoxiVision-toets.

Zodra u een pieptoon hoort (een microfoonanimatie start), kunt u spreken. Spraakherkenning stopt zodra je stopt met spreken.

De volledige lijst met spraakopdrachten is beschikbaar in Help > Spraakopdrachten



ZEG:

"Spraakopdrachten": lijst met alle spraakopdrachten

Een functie uitvoeren

- **"leesmachine"**: start de leesmachine
- **"multi-pagina"**: start de modus voor meerdere pagina's
- **"barcode"**: start de barcodelezer
- **"Vergrootglas"**: start het vergrootglas
- **"galerij"**: start de galerij
- **"label"**: labellezer starten
- **"Opmerking"**: start de bankbiljettendetector
- **"Dictafoon"**: start de dictafoon
- **"Instellingen"**: toegang tot de instellingen
- **"Help"**: help starten

Navigatie

- **"home"**: terugkeren naar de startpagina
- **"terug"**: terugkeren naar het vorige scherm
- **"pause"**: om een document te pauzeren terwijl het wordt gelezen
- **"lezen"**: om het lezen te hervatten wanneer een document wordt gelezen
- **"valideren"**: de keuze in een menu valideren
- **"stand-by"**: op stand-by zetten
- **"éteindre"**: uitschakelen

Geavanceerde functies

- **"Opslaan"**: het document opslaan (leesmachine, meerdere pagina's, galerij)
- **"vorige"**: vorige zin (leesmachine, galerij)
- **"volgende"**: volgende paragraaf (leesmachine, galerij)
- **"start"**: om het begin van het document te bereiken (leesmachine, galerij)
- **"vertalen"**: start de vertaler (leesmachine, galerij)
- **"vertalen in + taal"**: vertalen in taal (leesmachine, galerij)
- **"intelligente extractie"**: start intelligente extractie (leesmachine, galerij)
- **"verlichting"**: verlichting activeren/deactiveren (leesmachine, meerdere pagina's, barcode, loep, etiketten, bankbiljetten)
- **"zoom x[1-25]"**: zoom naar niveau [1-25] (vergrootglas)
- **"bevriezen"**: bevriest de afbeelding (vergrootglas)
- **"lezen"**: beginnen met het lezen van de tekst (wanneer de afbeelding bevroren is in het vergrootglas)
- **"paginanummer [nummer]"**: ga naar pagina [nummer] (galerij > meerdere pagina's)

Parameters

- **"contrast"**: verander het contrast
- **"Tekstgrootte"**: wijzig de tekstgrootte
- **"Tekst-naar-spraak"**: de tekst-naar-spraakfunctie wijzigen of uitschakelen
- **"deactiveer tekst-naar-spraak"**: deactiveer tekst-naar-spraak (schakelt over naar visuele modus)
- **"Tekst-naar-spraak activeren"**: de tekst-naar-spraakfunctie activeren
- **"afspeelsnelheid"**: de afspeelsnelheid instellen
- **"Helderheid"**: de helderheid instellen
- **"Knop"**: associeer de VoxiVision-knop met een knop.
- **"wifi"**: toegang tot Wi-Fi
- **"Bluetooth"**: toegang tot Bluetooth
- **"volume plus"**: verhoog het volume met 10%.
- **"Volume min"**: verminder het volume met 10%.

Informatie

- **"batterij"**: geeft het batterijniveau aan
- **"volume"**: geeft het huidige volume aan
- **"tijd"**: geeft de tijd aan
- **"datum"**: geeft de datum aan

TECHNISCHE INFORMATIE

Ondersteunde talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees.

Talen van vertalers: Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Russisch, Japans, Chinees, Thai.



Oplossingen voor een visuele uitdaging

Inhoudelijke of technische vragen over dit product?
Vind je het antwoord niet in deze handleiding?
Dan staan onze Service & Support collega's voor je klaar.

Service & Support

+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be

Contact

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Sensotec HQ
Vlamingveld 8
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

Sensotec Antwerpen
Kempstraat 100
B-2030 Antwerpen
T+32 3 828 80 15

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60